




Před použitím umístěte zařízení eFOLDi Lite na volném prostranství mimo dosah domácích zvířat a malých dětí. Rozložení je snadné a s nácvikem jej zvládnete nastavit během několika sekund.

Před prvním výletem doporučujeme nácvik.

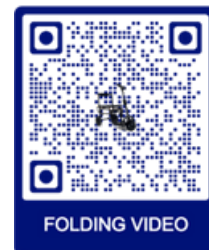

## JAK SE ROZLOŽIT

### KROK 1 - UVOLNĚNÍ SLOUPKU ŘÍZENÍ

Před zahájením odstraňte všechny obaly.



Zatlačením na žlutou západku uvolníte sloupek řízení a nechte jej volně vyklopit.

Zvedněte řídítka směrem ven a nahoru, dokud nezacvaknou do svislé polohy.

### KROK 2 - ODEMKNUTÍ A ROZLOŽENÍ



Podržte sloupek řízení, najděte malý žlutý přepínač na straně Lite a zatáhnutím za něj odemkněte přední kolo.

Přidrže sloupek řízení a opěradlo sedadla a oddělte je od sebe. Koloběžka se rozloží a uslyšíte cvaknutí, jak se uzamkne v otevřené poloze.

### KROK 3 - ZÁVĚREČNÉ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY



Přitlačením nohy na nášlapnou desku se ujistěte, že jsou zajišťovací západky bezpečně připevněny k ocelové tyči.

Zkontrolujte, zda je červená páčka magnetické brzdy v poloze ZABLOKOVÁNO, aby došlo k zablokování motoru.

# NÁVOD K OBSLUZE

## ZAČÍNÁME



Koloběžku zapnete stisknutím šedého tlačítka pod displejem baterie. Zvolte (D) pro jízdu nebo (R) pro jízdu vzad a poté stiskněte plynové tlačítko pro jízdu. Nezapomeňte baterii znovu nabít, když se na displeji zobrazí oranžová barva.



Chcete-li koloběžku přeměnit na pojízdné zavazadlo, vytáhněte říditka nahoru a stiskněte žlutou páčku, čímž ji zajistíte na druhém dorazovém bodě.



Chcete-li nabíjet, připojte napájecí kabel k nabíjecímu portu umístěnému v horní části sloupku řízení.



Chcete-li baterii vyjmout, zvedněte západku a opatrně ji vytáhněte nahoru. Nabíjecí port se nachází na boku baterie.

## JAK SE SKLÁDÁ

### KROK 1 - SKLOPENÍ OPĚRADLA A SLOUPKU ŘÍZENÍ



Opěradlo sedadla sklopte do roviny k základně sedadla.



Stiskněte a podržte malou žlutou západku na přední straně sloupku řízení a poté ji sklopte dolů až k rukojeti dolů, dokud nezapadnou na své místo, zajištěné magnetem.



**S namontovanými područkami,** zatáhněte za černý přepínač, aby se sedadlo uvolnilo a sklopilo.

### KROK 2 - SLOŽENÍ A UZAMČENÍ SKÚTRU



Uchopte skútr za sloupek řízení a rukojeť pro přenášení a zvedněte rám sedadla do vzpřímené polohy.



Nakloňte koloběžku dozadu pod úhlem (v případě potřeby můžete použít nohu za kolečkem, abyste ji podepřeli) a vyrovnejte ji na kolečkách.



Zatlačte sloupek řízení dovnitř, dokud přední kolo a západka nezapadnou na své místo. Poté sloupek pevně zatlačte, aby se pevně přitiskl k rámu.



Veďte prosím na vědomí, že tento leták slouží pouze jako stručný návod.

Úplné pokyny naleznete v našem návodu k obsluze výrobku.

V případě jakýchkoli dotazů nám zavolejte na číslo +44 800 915 0800 nebo napište na adresu [services@efoldi.com](mailto:services@efoldi.com).