





Rozložení koloběžky eFOLDi Explorer

Před nastartováním postavte skútr vzpřímeně v otevřeném prostoru mimo domácí zvířata a malé děti.

Rozložení koloběžky je jednoduché, s trochou cviku ji zvládnete postavit během několika sekund.

Než se poprvé vydáte ven, doporučujeme vám na skútru trénovat.

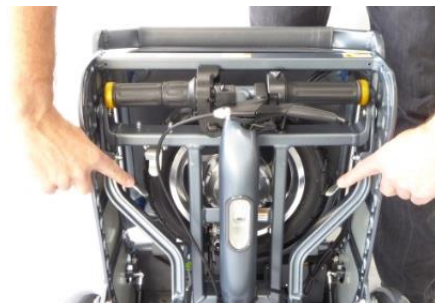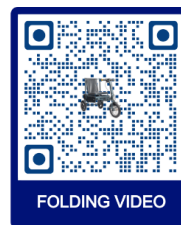

1 Najděte západky „B“ a „C“.



2 Stiskněte a podržte západky „B“ a „C“ a...



3 ...vytáhněte rukojeť pro přenášení do svislé polohy.



4 Uvolněte říditka zatažením směrem k sobě.



5 Zatlačením na říditka dolů a dovnitř uvolněte západku „E“.



6 Vytáhněte sloupek řízení nahoru a přes rukojeť, dokud nezapadne na místo.



7 Prudkým zatažením nebo otočením přední kolo uvolněte.



8 Spusťte skútr na zem a opatrně jej držte.



9 Vytáhněte sloupek řízení nahoru...



10 ...a ujistěte se, že klíč sloupku zapadl na místo pod západkou „A“.



11 Vytáhněte sedadlo vzpřímeně.



12 Zatlačte stupačky dolů. Váš skútr je nyní připraven.

Skládání koloběžky eFOLDi Explorer Scooter



- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Sklopte nožičky do vzpřímené polohy. | 2 | 3 |
|---|--------------------------------------|---|---|



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 4 | Sklopte sloupek řízení naplocho k sedadlu. | 5 | 6 |
|---|--|---|---|



- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 7 | Najděte západku „D“. | 8 | 9 |
|---|----------------------|---|---|



- | | | | |
|----|---|----|----|
| 10 | Zatlačte sloupek řízení do rámu, dokud západka „E“ nezapadne. | 11 | 12 |
|----|---|----|----|

Baterie eFOLDi Explorer Scooter



- | | | |
|---|--|---|
| Baterie má body pro nabíjení a pro napájení mobilního zařízení. | Vyjměte baterii odemknutím pomocí klíče a jemným tlakem. | VŽDY dobijte baterii každé 3 měsíce a/nebo měřidlo ukazuje 24 nebo méně. |
|---|--|---|