



RYCHLÝ PRŮVODCE - Čeština




eFOLDi

Rozložení koloběžky eFOLDi Lite

Před nastartováním postavte skútr vzpřímeně v otevřeném prostoru mimo domácí zvířata a malé děti.

Rozložení koloběžky je jednoduché a s trochou cviku ji zvládnete postavit během několika sekund.

Než se poprvé vydáte ven, doporučujeme vám na skútru trénovat.

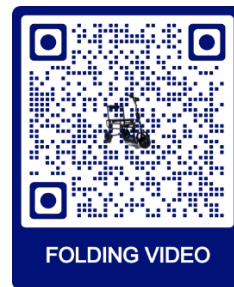

FOLDING VIDEO



1 Uvolněte západku sloupku řízení...

2 ...a nechte sloup volně se houpat.

3 Vytáhněte řídítka ven a nahoru...



4 ...dokud nezapadnou do vislé linie.

5 Najděte malou žlutou záračku na boku a zatažením uvolněte sestavu předního kola.

6 Podržte sloupek řízení a opěradlo sedadla a odtáhněte je od sebe...



7 ...skútr se rozloží, když odtáhněte opěradlo sedadla a sloupek řízení a...

8 ...skútr se sám uzamkne v otevřené poloze.

9 Ujistěte se, že uzamykací západky zapadly do ocelové tyče...



10 ...pokud ne, sešlápněte nohu na stupačku, aby se koloběžka otevřela.

11 Pokud ještě nejsou nainstalované, použijte sedák a opěradlo podle obrázku.

12 Zkontrolujte, zda je magnetická brzda v poloze **ZAMKNUTO**, aby se zapnul motor.

Skládání koloběžky eFOLDi Lite

		
<p>1 Sklopte opěradlo sedadla dolů k základně sedadla.</p>	<p>2 Stiskněte a podržte malou žlutou západku na sloupku řízení.</p>	<p>3 a sklopte sloupek dolů, dokud..</p>
		
<p>4 ..je uzamčena magnetickou západkou</p>	<p>5 Pevně uchopte skútr za sloupek řízení a rukojeť a pevně zatlačte sloupek dolů k stupeňce</p>	<p>6 Nakloňte skútr šikmo dozadu a použijte nohu za volantem, abyste zabránili jeho pohybu směrem od vás</p>
		
<p>7 ..zatlačte na sloupek řízení, dokud přední kolo nezapadne na místo...</p>	<p>8 ..a západka sloupku řízení se zablokuje.</p>	<p>9 Zatlačením na sloupek řízení jej pevně zajistíte k rámu.</p>

Provoz eFOLDi Lite

		
<p>Baterii lze vyjmout zvednutím západky a zvednutím nahoru.</p> <p>Na boční straně baterie je nabíjecí bod.</p>	<p>Chcete-li koloběžku zapnout, stiskněte šedé tlačítko pod displejem baterie.</p> <p>Vyberte (D) Jízda nebo (R) Zpátečka a pro jízdu stiskněte páčku plynu.</p> <p>Baterii vždy co nejdříve dobijte pokud je to možné, když je displej označující jantarovou.</p>	<p>Chcete-li ze skútru udělat cestovní zavazadlo, zajistěte, aby byl svislý sloupek řízení zajištěn proti západce sloupku řízení.</p>

Upozorňujeme, že tento leták má sloužit pouze jako rychlý průvodce. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce k produktu. Jakékoli dotazy, zavolejte nám na číslo 0800 915 0800 nebo napište e-mail na adresu hello@efoldi.com