



RYCHLÝ PRŮVODCE - Čeština





eFOLDi

Rozložení koloběžky eFOLDi MK1.5

Před nastartováním postavte skútr vzpřímeně v otevřeném prostoru mimo domácí zvířata a malé děti.

Rozložení koloběžky je jednoduché, s trochou cviku ji zvládnete postavit během několika sekund.

Než se poprvé vydáte ven, doporučujeme vám na skútru trénovat.

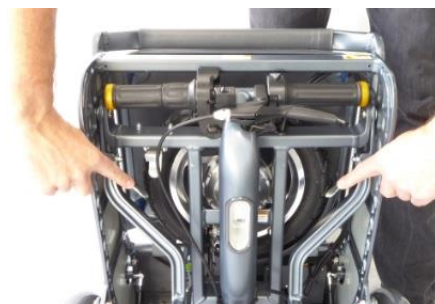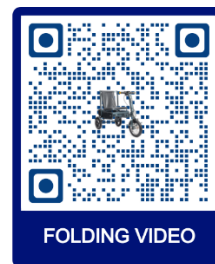

1 Najděte západky „B“ a „C“.



2 Stiskněte a podržte západky „B“ a „C“ a...



3 ...vytáhněte rukojeť pro přenášení do svislé polohy.



4 Uvolněte říditka zatažením směrem k sobě.



5 Zatlačením na říditka dolů a dovnitř uvolníte západku „E“.



6 Vytáhněte sloupek řízení nahoru a přes rukojeť, dokud nezapadne na místo.



7 Prudkým zatažením nebo otočením přední kolo uvolníte.



8 Spusťte skútr na zem a opatrně jej držte.



9 Vytáhněte sloupek řízení nahoru...



10 ...a ujistěte se, že klíč sloupku zapadl na místo pod západkou „A“.



11 Vytáhněte sedadlo vzpřímeně.



12 Zatlačte stupačky dolů. Váš skútr je nyní připraven.

Skládání koloběžky eFOLDi MK1.5



1 Sklopte nožičky do vzpřímené polohy.

2 Sklopte sedadlo dozadu.

3 Stiskněte a uvolněte západku „A“.



4 Sklopte sloupek řízení naplocho k sedadlu.



5 Zvedněte skútr do vzpřímené polohy.



6 Ujistěte se, že přední kolo je ploché a zajištěné k rámu magnetem.



7 Najděte západku „D“.



8 Při podepření sloupku řízení stiskněte západku „D“...



9 ...a přesuňte sloupek řízení přes rukojeť.



10 Zatlačte sloupek řízení do rámu, dokud západka „E“ nezapadne.



11 Přitlačte řídítka k rámu, dokud je magnet nezajistí na místě.



12 Stiskněte a podržte západky „B“ a „C“ a sklopte rukojeť dolů.

Baterie eFOLDi MK1.5



Baterie má body pro nabíjení a pro napájení mobilního zařízení.



Vyjměte baterii odemknutím pomocí klíče a jemným tlakem.



VŽDY dobijte baterii každé 3 měsíce a/nebo měřidlo ukazuje 24 nebo méně.