



HURTIGGUIDE – DANSK




eFOLDi

Udfoldning af eFOLDi Lite Scooter

Før du starter, skal du stille scooteren oprejst i et åbent rum væk fra kæledyr og små børn.

Det er nemt at folde scooteren ud, og med lidt øvelse vil du være i stand til at sætte den op på få sekunder.

Vi råder dig til at øve dig med scooteren, før du begiver dig ud for første gang.

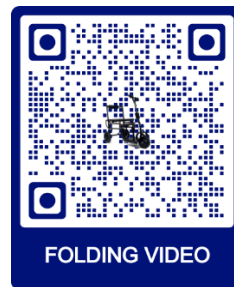

1

Slip ratstammelåsen...



2

og lad søjlen svinge frit.



3

Træk styret ud og opad.



4

...indtil de låser sig i en lodret linje.



5

Find den lille sorte stop på siden og træk for at frigøre forhjulssamlingen.



6

Hold ratstammen og ryglænet og træk dem fra hinanden...



7

...scooteren folder sig ud, når du trækker sæderyggen og ratstammen fra hinanden...



8

træk fra hinanden og...



9

... scooteren låser sig selv i sin åbne position.



10

Sørg for, at låselåsene er låst til stålstangen...



11








... hvis ikke, tryk din fod ned på fodpladen for at låse scooteren åben.






12

Kontroller, at den magnetiske bremse er i **LÅST** position for at aktivere motoren.

Sammenfoldning af eFOLDi Lite Scooter

		
1 Fold sædets ryglæn ned til sædebunden.	2 Tryk og hold den lille lås på ratstammen...	3 ...og fold søjlen ned indtil ...
		
4 ...det er låst af magnetlåsen.	5 Hold godt fast på scooteren i ratstammen og bærehåndtaget, og pres søjlen ned mod fodpladen	6 Vip scooteren tilbage i en vinkel, og brug din fod bag rattet for at forhindre, at den bevæger sig væk fra dig
		
7 ...tryk indad på ratstammen, indtil forhjulet låser på plads...	8 ...og ratstammens lås låses i position.	9 Tryk ratstammen ind for at låse den tæt mod rammen.

FOLDi Lite Betjening

		
Batteriet kan fjernes ved at løfte låsen og løfte opad. Der er et ladepunkt på siden af batteriet.	Tryk på den grå knap under batteridisplayet for at tænde for scooteren. Vælg (D) Drive eller (R) Reverse, og tryk på tommelfingergashåndtaget for at gå. Oplad altid batteriet så hurtigt som muligt, når displayet er indikerer rav.	For at gøre scooteren til rullende bagage skal du sikre dig, at den lodrette ratstamme er låst mod ratstammens lås.

Bemærk venligst, at denne brochure kun er tænkt som en hurtig guide. Se vores produktmanual for fuldstændige instruktioner. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din forhandler.