



HURTIGGUIDE – DANSK




eFOLDi

Udfoldning af eFOLDi Power Chair

Inden start placeres el-stolen på et åbent sted væk fra kæledyr og små børn.

Udfoldning er ligetil, og med lidt øvelse vil du være i stand til at sætte den op på få sekunder.

Vi råder dig til at øve dig med el-stolen, før du begiver dig ud for første gang.

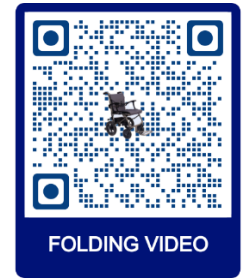

FOLDING VIDEO



1 Anti-tip hjul og batterioplader leveres med din el-stol.

2 Monter anti-tip-hjulene. Disse trykkes blot og låses på plads.

3 Fold el-stolen ud ved blot at skubbe sædebunden ned, mens du trækker udløserhåndtaget op.



4 Monter armlænsstøtterne i hullerne, og tryk dem ned, indtil de låser.
Hold kabler væk fra klempunkter

5 Tag kontrollereenheden og stangen og...

6 ...indsæt styrestangen i armlænsbeslaget under armlænet...



7 juster regulatorens position og spænd med den riflede knap.

8 _ Fjern ledsagerkontrollen fra baglommen og fastgør den til stangen bagpå.

9 Træk fodstøtten ned.



10 Monter sædehynder som vist. Disse holdes på plads af velcrotapper. Sørg for, at disse er foldet over ryglænet og under sædet.

11 Indsæt batterierne, indtil de klikker på plads.
Din el-stol er nu klar.

12 Tænd Power Chair ved at trykke på POWER-knappen.
Se din manual for fuldstændig information.

Sammenfoldning af eFOLDi EL-stolen

		
<p>1 Sluk for strømmen med POWER-knappen på håndbetjeningen. Sluk altid for strømmen, når stolen ikke er i brug for at spare på batteriet.</p>	<p>2 Løsn den riflede knap lidt, og fjern kontrolleren. Placer kontrolleren og sikkerhedssele på sædepudden. Stram knappen igen for at forhindre tab.</p>	<p>3 Fjern ledsagerens kontrol og anbring den i lommen bag på stolen.</p>
		
<p>4 Kontroller, at forhjulene er placeret foran for at sikre jævn foldning. Træk stolen med spidsen bagud for at justere hjulene</p>	<p>5 Ræk ud under kanten af sædet og træk udløserstangen op for at frigøre sædet og...</p>	<p>6 ...træk sædet opad og mod dig for at folde el-stolen sammen. Fold fodstøtte ind.</p>

eFOLDi Elstol Batteriopladning

		
<p>For at oplade Power Chair skal du sætte opladerkablet i bunden af joystick-kontrolleren og tilslutte AC-stikket til en stikkontakt. Dette vil oplade BEGGE batterier samtidigt.</p>	<p>For at fjerne batterier til rejse eller individuel opladning, tryk den røde tap opad og skub batteriet bagud.</p>	<p>Batterier kan oplades separat fra stolen ved at bruge den korte pigtail'-adapter, som skal forbindes til opladerledningen først.</p>

eFOLDi El-stol Betjening

		
<p>Håndsættets controller har knapper til at justere hastigheden og displays til at angive resterende strøm og hastighedsindstilling.</p> <p>Du kan deaktivere reverseringslyden ved at trykke på den viste knap.</p>	<p>Opladningsporten til din Power Chair er placeret under håndsættet til opladning af BEGGE batterier samtidigt.</p> <p>Der er også en USB-udgang til at forsyne en telefon eller anden USB-enhed.</p>	<p>Ledsagerkontrollen kan indstilles til at justere ganghastigheden for en ledsager/plejer og sørger også for et batteritjek.</p> <p>Håndtaget styrer bevægelse baglæns eller fremad.</p>