



HURTIGGUIDE – DANSK




eFOLDi

Udfoldning af eFOLDi Power Chair

Inden start placeres el-stolen på et åbent sted væk fra kæledyr og små børn.

Udfoldning er ligetil, og med lidt øvelse vil du være i stand til at sætte den op på få sekunder.

Vi råder dig til at øve dig med el-stolen, før du begiver dig ud for første gang.

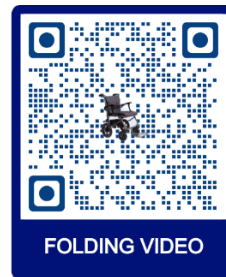

FOLDING VIDEO



1 Anti-tip hjul og batterioplader leveres med din el-stol.

2 Installer anti-tip hjulene, hvis det ønskes. Disse trykkes og låses ganske enkelt på plads.

3 Fold el-stolen ud ved blot at skubbe sædebunden ned.



4 Hold controllerkablet væk fra klempekter som armlænsstøtterne.

5 Monter armlænsstøtterne i hullerne, og tryk dem ned, indtil de låser.

6 Tag controllerenheden og...



7 ...indsæt kontrolstangen i armlænsbeslaget under armlænet...

8 ...juster regulatorens position og spænd med den riflede knap.

9 Fjern ledsagerkontrollen fra baglommen og fastgør den til stangen bagpå.



10 Træk fodstøtten ned.

11 Monter sædehynder som vist. Disse holdes på plads af velcro-tapper...

12 ...sørg for, at disse er foldet over ryglænet og under sædet. Power Chair er nu klar.

Folding the eFOLDi Power Chair



1 Løsn den riflede knap lidt, og fjern kontrolleren.



2 Placer kontrolleren og selebåndet på sædet.



3 Fjern ledsagerens kontrol og anbring den i lommen bag på stolen.



4 Sørg for, at begge armlæn er indstillet i deres højeste position...



5 ... ved at trykke på den lille sølvknap for at justere armlænene.



6 Kontroller, at forhjulene er placeret foran for at sikre jævn foldning.
RÅD Træk stolen bagud for at justere hjulene



7 Ræk derefter ud under kanten af sædet og træk udløserstangen op for at frigøre sædet og...



8 ...træk sædet opad for at folde el-stolen sammen



9 Fold fodstøtte ind.

eFOLDi Power Chair Operation



Batterier kan fjernes ved at trykke den røde tap opad og trække bagud.



Du tænder for hovedstrømmen her, som driver håndsettets controller.

Sluk altid for denne, når stolen ikke er i brug for at spare på batteriet.



Tænd for håndsettets controller.

Håndsettets controller har knapper til at justere hastigheden og displays til at angive resterende strøm og

Bemærk venligst, at denne brochure kun er tænkt som en hurtig guide. Se vores produktmanual for fuldstændige instruktioner. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din forhandler.