



BEKNOPTE HANDLEIDING NEDERLAND




eFOLDi

De eFOLDi Lite-scooter uitvouwen


Voordat u begint, moet u de scooter rechtop zetten in een open ruimte uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen.

Het uitvouwen van de scooter is eenvoudig en met een beetje oefening kun je hem binnen enkele seconden opzetten.

We raden je aan om te oefenen met de scooter voordat je er voor het eerst op uit gaat.

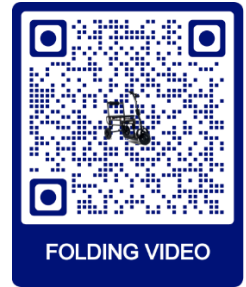

1 Stuurkolomvergrendeling losmaken...

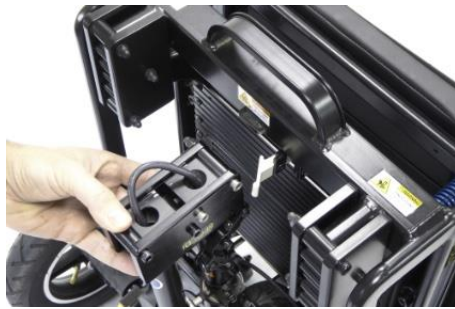

2 ...en laat de kolom vrij slingeren.



3 rek het stuur naar buiten en omhoog..



4 ... totdat ze in een verticale lijn vastklikken.



5 Zoek de kleine gele stop aan de zijkant en trek eraan om het voorwiel los te maken.



6 oud de stuurkolom en rugleuning vast en trek ze uit elkaar...



7 ...de scooter klapt uit als je de rugleuning en de stuurkolom uit elkaar trekt en...



8 ...de scooter zal zichzelf vergrendelen in zijn open positie.



9 Zorg ervoor dat de vergrendelingen zijn vergrendeld aan de stalen staaf..



10 ...zo niet, druk dan met uw voet op de voetplaat om de scooter open te vergrendelen.



11 Indien nog niet geïnstalleerd, breng dan de zitkussens en rugleuning aan zoals afgebeeld.



12 Controleer of de magnetische rem in de **VERGRENDELDE** stand staat om de motor in te schakelen.

De eFOLDi Lite-scooter opvouwen

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 1 Klap de rugleuning van de stoel naar beneden tot aan de stoelbasis. | 2 Houd de kleine gele grendel op de stuurkolom ingedrukt... | 3 ...en vouw de kolom naar beneden tot... |
|  |  |  |
| 4 ... het wordt vergrendeld door de magnetische sluiting. | 5 Houd de scooter stevig vast bij de stuurkolom en de draagbeugel en druk de kolom stevig naar beneden in de richting van de voetplaat | 6 Kantel de scooter schuin achterover en gebruik uw voet achter het stuur om te voorkomen dat hij van u af beweegt |
|  |  |  |
| 7 ...druk de stuurkolom naar binnen totdat het voorwiel vastklikt... | 8 ...en stuurkolomvergrendeling vergrendelt in positie. | 9 Druk de stuurkolom in om deze stevig tegen het frame te vergrendelen. |

eFOLDi Lite Operation

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| De batterij kan worden verwijderd door de vergrendeling op te tillen en omhoog te tillen. Aan de zijkant van de accu zit een | Om de scooter aan te zetten drukt u op de grijze knop onder het batterijdisplay. Selecteer (D) Rijden of (R) Achteruit en druk op de duimgashendel om te gaan. Laad de batterij altijd zo snel mogelijk opmogelijk wanneer het display is oranje aangeeft. | Om de scooter in rollende bagage te veranderen, moet u ervoor zorgen dat de verticale stuurkolom is vergrendeld tegen de vergrendeling van |