



## BEKNOPTE HANDLEIDING NEDERLAND



eFOLDi

### De eFOLDi Power Chair uitvouwen

Voordat u begint, plaatst u de Power Chair in een open ruimte, uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen.

Het uitvouwen is eenvoudig en met een beetje oefening kun je het binnen enkele seconden instellen.

Wij adviseren u om te oefenen met de Power Chair voordat u er voor het eerst



FOLDING VIDEO



1

Anti-tip wielen en acculader worden bij uw elektrische rolstoel geleverd.



2

Monteer desgewenst de anti-tip wielen. Deze drukken en klikken eenvoudig op hun plaats.



3

Vouw de Power Chair uit door simpelweg de zitting naar beneden te duwen.



4

Houd de controllerkabel uit de buurt van knelpunten zoals de armleuningsteunen.



5

Installeer armsteunsteunen in de sleuven en druk ze naar beneden totdat ze vastklikken.



6

Pak de controller en...



7

...steek de controllerstang in de armsteun die onder de armsteun past ...



8

...pas de positie van de controller aan en draai vast met de gekartelde knop.



9

Verwijder de bediening van de begeleider uit de achterzak en bevestig deze aan de stang aan de achterkant.



10

Trek de voetsteun naar beneden.



11

Installeer de zitkussens zoals afgebeeld. Deze worden op hun plaats gehouden door klittenband...



12

...zorg ervoor dat deze over de rugleuning en onder de zitting zijn geklapt. De elektrische stoel is nu klaar.

## De eFOLDi elektrische rolstoel opvouwen

<p><b>1</b> Draai de gekartelde knop iets los en verwijder de controller.</p>	<p><b>2</b> Plaats de controller en de veiligheidsgordel op de stoel.</p>	<p><b>3</b> Verwijder de bediening van de begeleider en plaats deze in de zak aan de achterkant van de stoel.</p>
<p><b>4</b> Zorg ervoor dat beide arMLEUNINGEN in de hoogste stand staan...</p>	<p><b>5</b> _ door op de kleine zilveren knop te drukken om de arMLEUNINGEN te verstellen.</p>	<p><b>6</b> Controleer of de voorwielen naar voren zijn geplaatst om soepel inklinken te garanderen. <b>Tip</b> trek de stoel naar achteren om de wielen uit te lijnen</p>
<p><b>7</b> Reik dan onder de rand van de stoel en trek de ontgrendelingsstang omhoog om de stoel los te maken en...</p>	<p><b>8</b> _ trek de stoel omhoog om de Power Chair in te klinken.</p>	<p><b>9</b> Voetsteun inklinken.</p>

## Bediening eFOLDi elektrische rolstoel

<p>Batterijen kunnen worden verwijderd door het rode lipje omhoog te drukken en naar achteren te trekken.</p>	<p>U schakelt hier de hoofdvoeding in die de handsetcontroller van stroom voorziet. <b>Schakel dit altijd uit als de stoel niet in gebruik is om de batterij te sparen.</b></p>	<p>Zet de handsetcontroller aan. De afstandsbediening heeft knoppen om de snelheid aan te passen en displays om het resterende vermogen en de snelheidsinstelling aan te geven.</p>

Houd er rekening mee dat deze brochure alleen als beknopte handleiding is bedoeld. Zie onze producthandleiding voor volledige instructies. Neem bij vragen contact op met uw dealer.