



GUIDE RAPIDE – FRANÇAIS



eFOLDi

Dépliage de la trottinette eFOLDi Lite


Avant de commencer, redressez le scooter dans un espace ouvert loin des animaux domestiques et des jeunes enfants.

Le dépliage du scooter est simple et avec un peu de pratique, vous pourrez le configurer en quelques secondes.

Nous vous conseillons de vous entraîner avec le scooter avant de vous aventurer pour la première fois.



1 Relâchez le loquet de la colonne de direction...

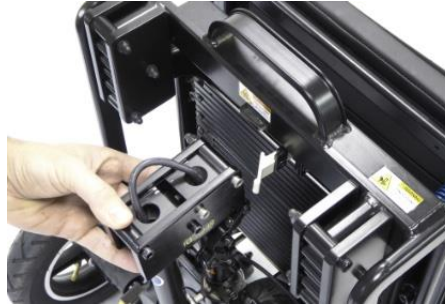

2 ...et laissez la colonne se balancer librement.



3 Tirez le guidon vers l'extérieur et vers le haut.



4 ... jusqu'à ce qu'ils se verrouillent sur une ligne verticale.



5 Localisez le petit bouchon noir sur le côté et tirez pour libérer l'ensemble de la roue avant.



6 Tenez la colonne de direction et le dossier du siège et séparez-les...



7 ... le scooter se dépliera lorsque vous séparerez le dossier du siège et la colonne de direction...



8 se séparer et...



9 le scooter se verrouillera dans sa position ouverte.



10 Assurez-vous que les loquets de verrouillage sont verrouillés sur la barre en acier...












11 ... sinon, appuyez votre pied sur le repose-pied pour verrouiller le scooter en position ouverte.



12 Vérifiez que le frein magnétique est en position **VERROUILLÉE** pour engager le moteur.

Plier la trottinette eFOLDi Lite

		
<p>1 Rabattez le dossier du siège vers la base du siège.</p>	<p>2 Appuyez et maintenez le petit loquet sur la colonne de direction...</p>	<p>3 ...et repliez la colonne jusqu'à ce que...</p>
		
<p>4 ...il est verrouillé par le loquet magnétique.</p>	<p>5 Tenez fermement le scooter par sa colonne de direction et la poignée de transport et appuyez fermement sur la colonne vers le repose-pieds</p>	<p>6 Basculez le scooter vers l'arrière et utilisez votre pied derrière le volant pour l'empêcher de s'éloigner de vous</p>
		
<p>7 ...appuyez vers l'intérieur sur la colonne de direction jusqu'à ce que la roue avant se verrouille en place...</p>	<p>8 ... et le loquet de la colonne de direction se verrouille en position.</p>	<p>9 Appuyez sur la colonne de direction pour la verrouiller fermement contre le cadre.</p>

eFOLDi Lite Operation

		
<p>La batterie peut être retirée en soulevant le loquet et en la soulevant vers le haut.</p> <p>Il y a un point de charge sur le côté de la batterie.</p>	<p>Pour allumer le scooter, appuyez sur le bouton gris sous l'affichage de la batterie.</p> <p>Sélectionnez (D) Drive ou (R) Reverse et appuyez sur la manette des gaz pour y aller.</p> <p>Rechargez toujours la batterie dès que possible lorsque l'affichage est indiquant l'ambre.</p>	<p>Pour transformer le scooter en bagage à roulettes, assurez-vous que la colonne de direction verticale est verrouillée contre le loquet de la colonne de direction.</p>

Veillez noter que cette brochure est uniquement destinée à servir de guide rapide. Consultez notre manuel du produit pour des instructions complètes. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.