



KURZANLEITUNG – DEUTSCH

eFOLDi 

Entfalten des eFOLDi Power Chair

Bevor Sie beginnen, stellen Sie den Elektrorollstuhl an einem offenen Ort abseits von Haustieren und kleinen Kindern auf.

Das Aufklappen ist unkompliziert und mit ein wenig Übung können Sie es in Sekundenschnelle aufbauen.

Wir empfehlen Ihnen, den Umgang mit dem Power Chair zu üben, bevor Sie sich zum ersten Mal auf den Weg machen.



1 Im Lieferumfang Ihres Elektrorollstuhls sind kipp sichere Räder und ein Batterieladegerät enthalten.

2 Montieren Sie die Anti-Kipp-Räder. Diese werden einfach gedrückt und rasten ein.

3 Klappen Sie den Elektrorollstuhl auf, indem Sie einfach die Sitzfläche nach unten drücken und gleichzeitig den Entriegelungshebel nach oben ziehen..



4 Setzen Sie die Armlehnenstützen in die Schlitz ein und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrasten.
Halten Sie Kabel von Quetschstellen fern

5 Nehmen Sie die Steuereinheit und die Stange und..

6 ..stecken Sie die Steuerstange in den Armlehnenbeschlag unter der Armlehne..



7 Stellen Sie die Position des Controllers ein und ziehen Sie ihn mit dem Rändelknopf fest.

8 Begleitpersonensteuerung aus der Gesäßtasche nehmen und hinten an der Stange befestigen.

9 Fußstütze nach unten ziehen.



10 Installieren Sie die Sitzkissen wie gezeigt. Diese werden durch Klettverschlusslaschen an Ort und Stelle gehalten. Stellen Sie sicher, dass diese über die Rückenlehne und unter den Sitz geklappt sind.

11 Legen Sie die Batterien ein, bis sie einrasten.
Ihr Elektrorollstuhl ist jetzt fertig.

12 Schalten Sie den Elektrorollstuhl ein, indem Sie die POWER-Taste drücken. Vollständige Informationen finden Sie in Ihrem Handbuch.

Zusammenklappen des eFOLDi Power Chair

		
<p>1 Schalten Sie den Strom mit der POWER-Taste auf der Handsteuerung aus. Schalten Sie den Stuhl immer aus, wenn er nicht verwendet wird, um Batteriestrom zu sparen.</p>	<p>2 Lösen Sie den Rändelknopf leicht und entfernen Sie den Controller. Platzieren Sie Controller und Sicherheitsgurt auf dem Sitzpolster. Ziehen Sie den Knopf wieder fest, um einen Verlust zu verhindern.</p>	<p>3 Entfernen Sie die Begleitsteuerung und stecken Sie sie in die Tasche an der Rückseite des Stuhls.</p>
		
<p>4 Überprüfen Sie, ob die Vorderräder vorne positioniert sind, um ein reibungsloses Zusammenklappen zu gewährleisten. Ziehen Sie den Stuhl nach hinten, um die Räder auszurichten</p>	<p>5 Greifen Sie unter die Sitzkante und ziehen Sie die Entriegelungsstange nach oben, um den Sitz zu lösen und.</p>	<p>6 ...Ziehen Sie den Sitz nach oben und zu sich hin, um den Elektrorollstuhl zusammenzuklappen. Fußstütze einklappen.</p>

Aufladen des Akkus des eFOLDi-Elektrollstuhls

		
<p>Um den Elektrorollstuhl aufzuladen, stecken Sie das Ladekabel in die Basis des Joystick-Controllers und verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose. Dadurch werden BEIDE Akkus gleichzeitig geladen.</p>	<p>Um die Akkus zum Reisen oder zum individuellen Aufladen zu entnehmen, drücken Sie die rote Lasche nach oben und schieben Sie den Akku nach hinten.</p>	<p>Die Batterien können separat vom Stuhl aufgeladen werden, indem der kurze „Pigtail“-Adapter verwendet wird, der zuerst an das Ladekabel angeschlossen werden muss.</p>

Bedienung des Elektrorollstuhls eFOLDi

		
<p>Der Handregler verfügt über Tasten zum Einstellen der Geschwindigkeit und zeigt Anzeigen zur Anzeige der verbleibenden Leistung und der Geschwindigkeitseinstellung an. Sie können den Rückfahrstunder deaktivieren, indem Sie die angegebene Taste drücken.</p>	<p>Es gibt auch einen USB-Anschluss für die Stromversorgung eines Telefons oder eines anderen USB-Geräts.</p>	<p>Die Begleitsteuerung kann so eingestellt werden, dass sie die Gehgeschwindigkeit eines Begleiters/Betreuers anpasst und auch eine Batterieprüfung ermöglicht.</p> <p>Der Hebel steuert die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung.</p>