


ð brjóta upp eFOLDi Lite Vespu

Áður en þú byrjar skaltu standa vespuna upprétta í opnu rými fjarri gæludýrum og litlum börnum.

Það er einfalt að brjóta upp vespuna og með smá æfingu muntu geta sett hana upp á nokkrum sekúndum.

Við ráðleggjum þér að æfa þig með vespu áður en þú ferð út í fyrsta skipti.

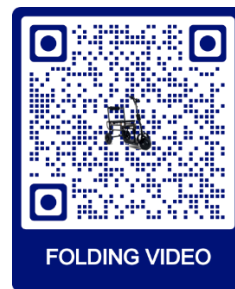

1 Slepptu gulu stýrissúlunni....



2 ...og leyfðu súlunni að sveiflast frjáls.



3 Dragðu stýrið út og upp..



4 ...þar til þeir læsast í lóðrétta línu.



5 Finndu lítinn gular tappa á hliðinni og dragðu til að losa framhjólasamstæðuna.



6 Haltu í stýrissúluna og sætisbakið og dragðu þau í sundur...



7 ...vespun opnast þegar þú dregur sætisbakið og stýrissúluna í sundur og...



8 ...vespun læsist í opinni stöðu.



9 Gakktu úr skugga um að læsingarnar hafi læst við stálstöngina...



10 ...ef ekki ýttu fæti þínum niður á fótplötuna til að læsa vespunum opinni.





11 Ef það er ekki þegar sett upp skaltu setja sætisþúðana og sætisbakið á eins og sýnt er.



12 Athugaðu hvort segulbremsan sé í LÆSTUR stöðu til að tengja mótórin.

Að brjóta saman eFOLDi Lite vespu

		
<p>1 Leggðu sætisbakið niður að sætisbotninum.</p>	<p>2 Ef vespu er með armpúða, dragðu svarta rofann til að losa og felldu síðan bakstoð niður samkvæmt (1)</p>	<p>3 Ýttu á og haltu litlu gulu læsingunni á stýrissúlunni...</p>
		
<p>4 ...og brettu dálkinn niður þar til það er læst með segulfestingunni.</p>	<p>5 Haldið þétt um vespuna í stýrissönginni og burðarhandfanginu og þrýstu sönginni þétt niður í átt að fótplötunni</p>	<p>6 Snúðu vespunni aftur í horn og notaðu fótinn undir stýri til að koma í veg fyrir að hún hreyfist frá þér</p>
		
<p>7 ..ýttu inn á stýrissúluna þar til framhjólíð læsist á sinn stað...</p>	<p>8 og stýrissúlulæsing læsist í stöðu.</p>	<p>9 Ýttu inn stýrissúlunni til að læsa honum vel að grindinni.</p>

eFOLDi Lite aðgerð

		
<p>Til að kveikja á vespu ýttu á grúa hnappinn fyrir neðan rafhlöðuskjáinn. Veldu (D) Drive eða (R) Reverse og ýttu á þumalinnngjöfina til að fara.</p>	<p>Hægt er að hlaða rafhlöðuna með því að nota hleðslutengið eins og sýnt er. Alltaf endurhlaða rafhlöðuna eins fljótt eins og hægt er þegar skjárin er sem gefur til kynna gulbrúnt.</p>	<p>Hægt er að fjarlægja rafhlöðuna með því að lyfta læsingunni og lyfta rafhlöðunni upp á við. Eftir að rafhlaðan hefur verið fjarlægð er hægt að hlaða hana með því að nota innstunguna á hlið rafhlöðunnar.</p>

Vinsamlegast athugið að þessum fylgiseðli er eingöngu ætlað að vera leiðbeiningar. Fyrir allar leiðbeiningar, vinsamlegast skoðuðu notendahandbókina okkar. Allar spurningar, vinsamlegast hringdu í okkur í síma 0800 915 0800 eða sendu tölvupóst á services@efoldi.com