



FLÝTILEIÐARVÍSIR ð brjóta upp eFOLDi Lite Vespu



eFOLDi


Áður en þú byrjar skaltu standa vespuna upprétta í opnu rými fjarri gæludýrum og litlum börnum.

Það er einfalt að brjóta upp vespuna og með smá æfingu muntu geta sett hana upp á nokkrum sekúndum.

Við ráðleggjum þér að æfa þig með vespu áður en þú ferð út í fyrsta skipti.



1 Losaðu stýrissúlulæsinguna...

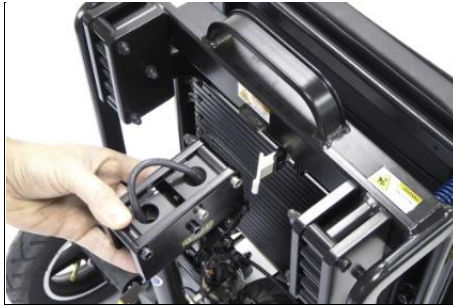

2 ...og leyfðu súlnni að sveiflast frjálts.



3 Dragðu stýrið út og upp..



4 ...þar til þeir læsast í lóðrétta línu.



5 Finndu lítinn svarta tappa á hliðinni og dragðu til að losa framhjólasamstæðuna.



6 Haltu í stýrissúluna og sætisbakið og dragðu þau í sundur...



7 ... vespun opnast þegar þú dregur sætisbakið og stýrissúluna í sundur og ...



8 ... vespun læsist í opinni stöðu.



9 Gakktu úr skugga um að læsingarnar hafi læst við stálstöngina...



10 ...ef ekki ýttu fæti þínum niður á fótplötuna til að læsa vespunum opinni.



11 Ef það er ekki þegar sett upp skaltu setja sætisþúðana og sætisbakið á eins og sýnt er.



12 Athugaðu hvort segulbremsan sé í **LÆSTUR** stöðu til að tengja mótörinn.

Að brjóta saman eFOLDi Lite vespu

		
1 Leggðu sætisbakið niður að sætisbotninum.	2 Ýttu á og haltu litlu lásnum á stýrissúlunni.	3 ...og brettu dálkinn niður þar til.
		
4 ...það er læst með segulfestingunni.	5 Haldið þétt um vespuna í stýrisstönginni og burðarhandfanginu og þrýstu stönginni þétt niður í átt að fótplötunni	6 Snúðu vespunni aftur í horn og notaðu fótinn undir stýri til að koma í veg fyrir að hún hreyfist frá þér
		
7 ...ýttu inn á stýrissúluna þar til framhjólíð læsist á sinn stað.	8 og stýrissúlulæsing læsist í stöðu.	9 Ýttu inn stýrissúlunni til að læsa honum vel að grindinni.

eFOLDi Lite aðgerð

		
<p>Hægt er að fjarlægja rafhlöðuna með því að lyfta læsingunni og lyfta henni upp.</p> <p>Það er hleðslupunktur á hlið rafhlöðunnar.</p>	<p>Til að kveikja á vespu ýttu á gráa hnappinn fyrir neðan rafhlöðuskjáinn.</p> <p>Veldu (D) Drive eða (R) Reverse og ýttu á þumalinnngjöfina til að fara.</p> <p>Alltaf endurhlaða rafhlöðuna um leið eins og hægt er þegar skjárinn er sem gefur til kynna gulbrúnt.</p>	<p>Til að breyta vespunni í rúllandi farangur skaltu tryggja að lóðréttu stýrissúlan sé læst</p>

Vinsamlegast athugið að þessum fylgiseðli er eingöngu ætlað að vera leiðbeiningar. Fyrir allar leiðbeiningar, vinsamlegast skoðaðu notendahandbókina okkar. Allar spurningar, vinsamlegast hringdu í okkur í síma 0800 915 0800 eða sendu tölvupóst á services@efoldi.com