




Prima dell'uso, posizionare l'eFOLDi Lite in un'area aperta, lontano da animali domestici e bambini piccoli. Lo srotolamento è facile e, con la pratica, è possibile installarlo in pochi secondi. Si consiglia di fare pratica prima della prima uscita.

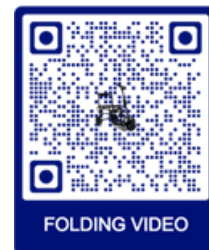

COME SVOLGERE

FASE 1 - SBLOCCARE IL PIANTONE DELLO STERZO

Rimuovere tutti gli imballaggi prima di iniziare.



Spingere il fermo giallo per sbloccare il piantone dello sterzo, consentendogli di oscillare liberamente.

Solleverare il manubrio verso l'esterno e verso l'alto finché non scatta saldamente in posizione verticale.

FASE 2 - SBLOCCARE E APRIRE



Tenere il piantone dello sterzo e individuare la piccola levetta gialla sul lato del Lite e tirarla per sbloccare il gruppo ruota anteriore.

Tenere il piantone dello sterzo e lo schienale del sedile e staccarli. Il monopattino si aprirà e si sentirà un clic mentre si blocca in posizione aperta.

FASE 3 - CONTROLLI DI SICUREZZA FINALI



Assicurarsi che le chiusure di bloccaggio siano saldamente fissate alla barra d'acciaio premendo il piede sulla pedana.



Verificare che la leva rossa del freno magnetico sia in posizione di BLOCCO per bloccare il motore.

INIZIARE A LAVORARE

COME FUNZIONA



Per accendere lo scooter, premere il pulsante grigio sotto il display della batteria. Selezionare (D) per la guida o (R) per la retromarcia, quindi premere l'acceleratore a pollice per partire. Assicurarsi di ricaricare la batteria non appena il display visualizza il colore ambra.



Per trasformare lo scooter in un bagaglio a mano, tirare il manubrio verso l'alto e premere la leva gialla, fissandola sul secondo punto di arresto.



Per la ricarica, collegare il cavo di alimentazione alla porta di ricarica situata nella parte superiore del piantone dello sterzo.



Per rimuovere la batteria, sollevare il fermo e tirarla con cautela verso l'alto.

La porta di ricarica si trova sul lato della batteria.

COME PIEGARE PER RIPORE

FASE 1 - RIPIEGARE LO SCHIENALE E IL PIANTONE DELLO STERZO



Ripiegare lo schienale del sedile contro la base del sedile.

Premere e tenere premuto il piccolo fermo giallo sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, quindi ripiegarlo verso il basso fino a quando la barra della maniglia non scatta in posizione, fissata dal magnete.



Con i braccioli montati, tirare la ginocchiera nera per sganciare il sedile e ripiegarlo.

FASE 2 - CHIUDERE E BLOCCARE LO SCOOTER



Afferrare lo scooter dal piantone dello sterzo e dalla maniglia di trasporto e sollevare il telaio del sedile in posizione verticale.



Inclinare il monopattino all'indietro con un angolo (se necessario, si può usare il piede dietro la ruota per tenerlo fermo), bilanciandolo sulle rotelle.



Premere il piantone dello sterzo verso l'interno finché la ruota anteriore e il fermo non scattano saldamente in posizione. Quindi, spingere con forza il piantone per bloccarlo saldamente contro il telaio.

Si prega di notare che questo opuscolo è solo una guida rapida. Per le istruzioni complete, consultare il manuale d'uso del prodotto. Per qualsiasi domanda, chiamateci al numero +44 800 915 0800 o inviate un'e-mail a services@efoldi.com.