



GUIDA RAPIDA – ITALIANO



eFOLDi

Apertura dello scooter eFOLDi Lite

Prima di iniziare, posizionare lo scooter in posizione verticale in uno spazio aperto lontano da animali domestici e bambini piccoli.

Aprire lo scooter è semplice e con un po' di pratica sarai in grado di configurarlo in pochi secondi.

Ti consigliamo di esercitarti con lo scooter prima di avventurarti per la prima volta.



1

Sganciare il fermo del piantone dello sterzo...



2

...e lascia che la colonna oscilli liberamente.



3

Tirare il manubrio verso l'esterno e verso l'alto...



4

...fino a quando non si bloccano in una linea verticale.



5

Individuare il piccolo fermo giallo sul lato e tirare per rilasciare il gruppo dell



6

Tieni il piantone dello sterzo e il sedile indietro e separali...



7

...lo scooter si aprirà mentre allontani lo schienale e il piantone dello sterzo e...



8

...lo scooter si bloccherà in posizione aperta.



9

Assicurati che i chiavistelli di chiusura siano bloccati sulla barra d'acciaio...



10

...in caso contrario, premere il piede sulla pedana per bloccare l'apertura dello scooter.



11

Se non già installati, applicare i cuscini del sedile e lo schienale come illustrato.



12

Verificare che il freno magnetico sia in posizione **BLOCCATO** per innestare il motore.

Piegare lo scooter eFOLDi Lite

		
<p>1 Abbassare lo schienale del sedile fino alla base del sedile.</p>	<p>2 Tieni premuto il piccolo fermo giallo sul piantone dello sterzo...</p>	<p>3 ...e piegare la colonna verso il basso fino a...</p>
		
<p>4 ...è bloccato dal fermo magnetico.</p>	<p>5 Tenere saldamente lo scooter per il piantone dello sterzo e la maniglia di trasporto e premere con decisione il piantone verso la pedana</p>	<p>6 Inclinare lo scooter all'indietro in un angolo e utilizzare il piede dietro il volante per evitare che si allontani da te</p>
		
<p>7 ...premere verso l'interno il piantone dello sterzo finché la ruota anteriore non si blocca in posizione...</p>	<p>8 ...e il fermo del piantone dello sterzo si blocca in posizione.</p>	<p>9 Premere il piantone dello sterzo per bloccarlo saldamente contro il telaio.</p>

Operazione eFOLDi Lite

		
<p>La batteria può essere rimossa sollevando il fermo e sollevandolo verso l'alto.</p> <p>C'è un punto di ricarica sul lato della batteria.</p>	<p>Per accendere lo scooter, premere il pulsante grigio sotto il display della batteria.</p> <p>Selezionare (D) Drive o (R) Reverse e premere l'acceleratore a pollice per andare.</p> <p>Ricaricare sempre la batteria al più presto possibile quando il display è indicando ambrà.</p>	<p>Per trasformare lo scooter in un bagaglio a rotelle, assicurarsi che il piantone dello sterzo verticale sia bloccato contro il fermo del piantone dello sterzo.</p>