



## GUIDA RAPIDA – ITALIANO




eFOLDi

### Apertura dello scooter eFOLDi Lite

Prima di iniziare, posizionare lo scooter in posizione verticale in uno spazio aperto lontano da animali domestici e bambini piccoli.

Aprire lo scooter è semplice e con un po' di pratica sarai in grado di configurarlo in pochi secondi.

Ti consigliamo di esercitarti con lo scooter prima di avventurarti per la prima volta.

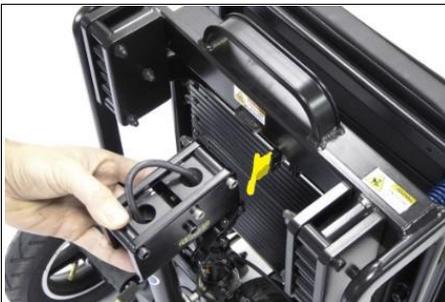

1 Rilasciare il fermo giallo del piantone dello sterzo....

2 ...e lascia che la colonna oscilli liberamente.

3 Tirare il manubrio verso l'esterno e verso l'alto...



4 ...fino a quando non si bloccano in una linea verticale.

5 Individuare la piccola levetta gialla sul lato e tirare per rilasciare il gruppo della ruota anteriore.

6 Tieni il piantone dello sterzo e il sedile indietro e separali...



7 ...lo scooter si aprirà mentre allontani lo schienale e il piantone dello sterzo e...

8 ...lo scooter si bloccherà in posizione aperta.

9 Assicurati che i chiavistelli di chiusura siano bloccati sulla barra d'acciaio...



10 ...in caso contrario, premere il piede sulla pedana per bloccare l'apertura dello scooter.

11 Se non già installati, applicare i cuscini del sedile e lo schienale come illustrato.

12 Verificare che il freno magnetico sia in posizione BLOCCATO per innestare il motore.

## Piegare lo scooter eFOLDi Lite

		
1 Abbassare lo schienale del sedile fino alla base del sedile.	2 Se lo scooter è dotato di braccioli, tirare la levetta nera per sbloccarli, quindi abbassare lo schienale come indicato (1)	3 Tieni premuto il piccolo fermo giallo sul piantone dello sterzo...
		
4 ...e piegare la colonna verso il basso fino a è bloccato dal fermo magnetico.	5 Tenere saldamente lo scooter per il piantone dello sterzo e la maniglia di trasporto e premere con decisione il piantone verso la pedana	6 Inclinare lo scooter all'indietro in un angolo e utilizzare il piede dietro il volante per evitare che si allontani da te
		
7 ..premere verso l'interno il piantone dello sterzo finché la ruota anteriore non si blocca in posizione...	8 ...e il fermo del piantone dello sterzo si blocca in posizione.	9 Premere il piantone dello sterzo per bloccarlo saldamente contro il telaio.

## Operazione eFOLDi Lite

		
Per accendere lo scooter, premere il pulsante grigio sotto il display della batteria.  Selezionare (D) Drive o (R) Reverse e premere l'acceleratore a pollice per andare.	La batteria può essere caricata utilizzando la porta di ricarica come mostrato.  Ricaricare sempre la batteria al più presto possibile quando il display è indicando l'ambr.	La batteria può essere rimossa sollevando il fermo e sollevando la batteria verso l'alto.  Dopo la rimozione la batteria può essere caricata utilizzando la presa sul lato della batteria.