



GUIDA RAPIDA – ITALIANO




eFOLDi

Apertura dello scooter eFOLDi Lite

Prima di iniziare, posizionare lo scooter in posizione verticale in uno spazio aperto lontano da animali domestici e bambini piccoli.

Aprire lo scooter è semplice e con un po' di pratica sarai in grado di configurarlo in pochi secondi.

Ti consigliamo di esercitarti con lo scooter prima di avventurarti per la prima volta.

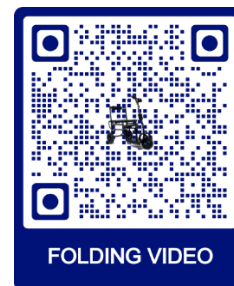

1

Sganciare il fermo del piantone dello sterzo...



2

...e lascia che la colonna oscilli liberamente.



3

Tirare il manubrio verso l'esterno e verso l'alto...



4

...fino a quando non si bloccano in una linea verticale.



5

Individuare il piccolo fermo nero sul lato e tirare per rilasciare il gruppo ruota anteriore.



6

Tieni il piantone dello sterzo e il sedile indietro e separali...



7

...lo scooter si aprirà mentre allontani lo schienale e il piantone dello sterzo...



8

smontare e...



9

...lo scooter si bloccherà in posizione aperta.



10

Assicurati che i chiavistelli di chiusura siano bloccati sulla barra d'acciaio...



11










...in caso contrario, premere il piede sulla pedana per bloccare l'apertura dello scooter.



12

Verificare che il freno magnetico sia in posizione **BLOCCATO** per innestare il motore.

Piegare lo scooter eFOLDi Lite

		
1 Abbassare lo schienale del sedile fino alla base del sedile.	2 Tieni premuto il chiavistello sul piantone dello sterzo...	3 ...e piegare la colonna verso il basso fino a...
		
4 ...è bloccato dal fermo magnetico.	5 Tenere saldamente lo scooter per il piantone dello sterzo e la maniglia di trasporto e premere con decisione il piantone verso la pedana	6 Inclinare lo scooter all'indietro in un angolo e utilizzare il piede dietro il volante per evitare che si allontani da te
		
7 ...premere verso l'interno il piantone dello sterzo finché la ruota anteriore non si blocca in posizione...	8 ...e il fermo del piantone dello sterzo si blocca in posizione.	9 Premere il piantone dello sterzo per bloccarlo saldamente contro il telaio.

Operazione eFOLDi Lite

		
La batteria può essere rimossa sollevando il fermo e sollevandolo verso l'alto. C'è un punto di ricarica sul lato della batteria.	Per accendere lo scooter, premere il pulsante grigio sotto il display della batteria. Selezionare (D) Drive o (R) Reverse e premere l'acceleratore a pollice per andare. Ricaricare sempre la batteria al più presto possibile quando il display è indicando ambrà.	Per trasformare lo scooter in un bagaglio a rotelle, assicurarsi che il piantone dello sterzo verticale sia bloccato contro il fermo del piantone dello sterzo.