



HURTIGGUIDE – NORSK




eFOLDi

Utfolding av eFOLDi Explorer Scooter


Stå scooteren oppreist før start i en åpen plass unna kjæledyr og små barn.

Å brette ut scooteren er grei, med litt øvelse vil du kunne sette den opp på sekunder.

Vi anbefaler deg å øve med scooteren før du begir deg ut for første gang.

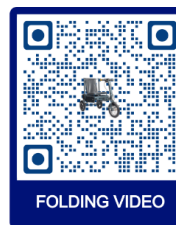

FOLDING VIDEO

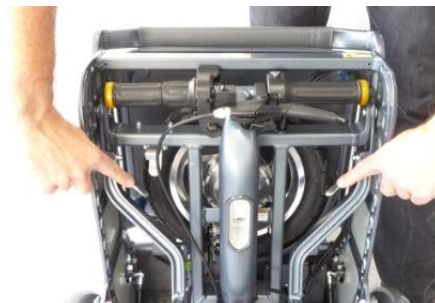

1

Finn 'B' og 'C' låsene.



2

Trykk og hold inne 'B' og 'C' låsene og...



3

...trekk dra/bærehåndtaket opp.



4

Slipp styret ved å trekke mot deg.



5

Mens du skyver styret ned og innover, slipp 'E'-låsen.



6

Trekk rattstammen opp og over bærehåndtaket til det låses på plass.



7

Slipp forhjulet ved å dra eller vri.



8

Senk scooteren forsiktig til bakken.



9

Trekk rattstammen oppreist...



10

...og sørg for at kolonnenøkkelen låses på plass under låsen 'A'.



11


Trekk seteryggen oppreist.



12

Skyv fotpinnene ned. Scooteren din er nå klar.

Sammenlegging av eFOLDi Explorer Scooter

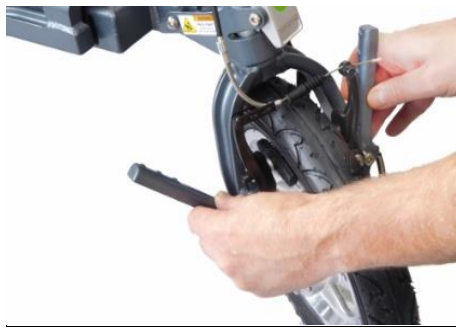

1 Brett fotpinnene til oppreist stilling.



2 Fell setet ned igjen.



3 Trykk og slipp låsen 'A'.



4 Brett rattstammen flatt mot setet.



5 Løft scooteren til oppreist stilling.



6 Sørg for at forhjulet er flatt og låst til rammen med magneten.



7 Finn låsen 'D'.



8 Mens du støtter rattstammen, trykk på låsen 'D'...



9 ...og før rattstammen over bærehåndtaket.



10 Trykk rattstammen inn i rammen til låsen 'E' låses.



11 Trykk styret mot rammen til magneten låser dem på plass.



12 Trykk og hold låsene 'B' og 'C' og brett ned bærehåndtaket.

eFOLDi Explorer-batteriet



Batteriet har punkter for lading og for strøm til en mobil enhet.



Ta ut batteriet ved å låse opp med nøkkelen og trykke forsiktig.



Lad ALLTID batteriet hver 3. måned og/eller måleren viser 24 eller mindre.