



HURTIGGUIDE – NORSK




eFOLDi

Utfolding av eFOLDi Lite Scooter

Før du starter, stå scooteren oppreist på et åpent sted unna kjæledyr og små barn.

Å folde ut sparkesykkelen er grei og med litt øvelse vil du kunne sette den opp på sekunder.

Vi anbefaler deg å øve med scooteren før du begir deg ut for første gang.

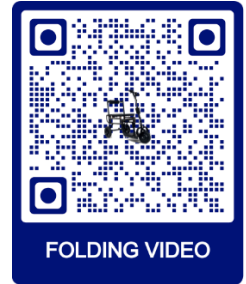

1 Slipp rattstammelåsen...

2 ...og la søylen svinge fritt.

3 Trekk styret ut og oppover...



4 ...til de låser seg i en vertikal linje.

5 Finn en liten gul stopper på siden og trekk for å frigjøre forhjulsenheten

6 Hold rattstammen og seteryggen og trekk dem fra hverandre...



7 ...scooteren vil utfolde seg når du trekker seteryggen og rattstammen fra hverandre og...

8 ...scooteren låser seg selv i åpen posisjon.

9 Sørg for at låselåsene er låst til stålstangen...



10 ... hvis ikke trykker du foten ned på fotplaten for å låse scooteren åpen.

11 Hvis det ikke allerede er installert, påfør seteputene og seteryggen som vist

12 Kontroller at magnetbremsen er i **LÅST** posisjon for å koble inn motoren.

Sammenlegging av eFOLDi Lite Scooter



1

Fell seteryggen ned til setebunnen.



2

Trykk og hold den lille gule låsen på rattstammen...



3

...og brett kolonnen ned til ..



4

...den låses av magnetlåsen.



5

Hold scooteren godt i rattstammen og bærehåndtaket, og press kolonnen ned mot fotplaten



6

Vipp scooteren tilbake i en vinkel og bruk foten bak rattet for å hindre at den beveger seg bort fra deg



7

...trykk innover på rattstammen til forhjulet låses på plass...



8

...og rattstammelåsen låses i posisjon.



9

Trykk inn rattstammen for å låse den tett mot rammen.

eFOLDi Lite - operasjon



Batteriet kan fjernes ved å løfte låsen og løfte oppover.

Det er et ladepunkt på siden av batteriet.



For å slå på scooteren, trykk på den grå knappen under batteridisplayet.

Velg (D) Kjør eller (R) Revers og trykk på tommelgasspaken for å gå.

Lad alltid batteriet så snart som mulig som mulig når skjermen er



For å gjøre scooteren til rullende bagasje, sørg for at den vertikale rattstammen er låst mot rattstammelåsen.