



HURTIGGUIDE – NORSK




eFOLDi

Utfolding av eFOLDi Power Chair

Før start, plasser el-stolen på et åpent sted unna kjæledyr og små barn.

Utfolding er enkel og med litt øvelse vil du kunne sette den opp på sekunder.

Vi anbefaler deg å øve med elektrisk stol før du begir deg ut for første gang.

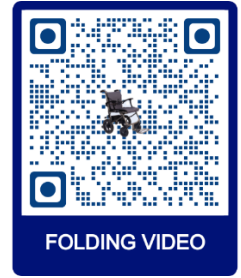

FOLDING VIDEO



1

Tippesikringshjul og batterilader følger med Power Chair

2

Monter tippesikringshjulene. Disse trykkes ganske enkelt og låses på plass.

3

Fold ut el-stolen ved ganske enkelt å skyve setebunnen ned mens du trekker utløser-spaken opp.



4

Installer armlenstøtter i sporene og trykk dem ned til de låses. **Hold kablene unna klempunkter**

5

Ta kontrollenheten og stangen og...

6

...sett styrestangen inn i armlensbeslaget under armlenet...



7

juster posisjonen til kontrolleren og trekk til med den riflede knotten.

8

_ Fjern ledsagerkontrollen fra baklommen og fest den til stangen bak.

9

rekk fotstøtten ned.



10

Monter seteputer som vist. Disse holdes på plass av borrelås. Pass på at disse legges over ryggstøtten og under setet.

11

Sett inn batteriene til de klikker på plass. Din elektriske stol er nå klar.

12

Slå på Power Chair ved å trykke på POWER-knappen. Se håndboken din for full informasjon.

Sammenlegging av eFOLDi Power Chair

		
<p>1 Slå av strømmen med POWER-knappen på håndkontrollen. Slå alltid av strømmen når stolen ikke er i bruk for å spare batteristrøm.</p>	<p>2 Løsne den riflede knotten litt og fjern kontrollere og sikkerhetsbeltet på seteputen. Stram knotten igjen for å unngå tap.</p>	<p>3 Fjern ledsagerkontrollen og plasser den i lommen bak på stolen.</p>
		
<p>4 Sjekk at forhjulene er plassert foran for å sikre jevn folding. Spissen trekk stolen bakover for å justere hjulene</p>	<p>5 Nå under kanten av setet og trekk utløserstangen opp for å frigjøre setet og...</p>	<p>6 ...trekk setet oppover og mot deg for å folde sammen el-stolen. Brett inn fotstøtte.</p>

eFOLDi Power Chair Batterilading

		
<p>For å lade Power Chair plugg ladeledningen inn i bunnen av joystick-kontrolleren og koble AC-støpselet til en stikkontakt. Dette vil lade BEGGE batteriene samtidig.</p>	<p>For å fjerne batterier for reise eller individuell lading, trykk den røde tappet oppover og skyv batteriet bakover.</p>	<p>Batterier kan lades separat fra stolen ved å bruke den korte 'pigtail'-adapteren som må kobles til ladeledningen først.</p>

eFOLDi Elstoldrift

		
<p>Håndsett-kontrolleren har knapper for å justere hastighet og skjermer for å indikere gjenværende strøm og hastighetsinnstilling.</p> <p>Du kan deaktivere reverseringslyden ved å trykke på knappen som vises.</p>	<p>Ladeporten for Power Chair er plassert under håndsettet for lading av BEGGE batteriene samtidig.</p> <p>Det er også et USB-uttak for strøm til en telefon eller annen USB-enhet.</p>	<p>Lederkontrollen kan stilles inn til å justere ganghastigheten for en ledsager/pleier og gir også en batterisjekk.</p> <p>Spaken styrer bevegelse bakover eller fremover.</p>