




Antes de utilizar, coloque o eFOLDi Lite numa área aberta, longe de animais de estimação e crianças pequenas. O desdobramento é fácil e, com prática, pode ser montado em segundos.

Recomendamos que pratique antes da sua primeira saída.

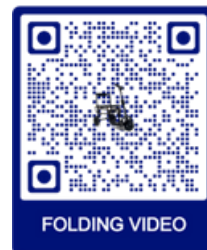

COMO DESDOBRAR

PASSO 1 - LIBERTAR A COLUNA DE DIRECÇÃO

Retirar todas as embalagens antes de começar.



Empurre o trinco amarelo para libertar a coluna de direcção, permitindo que esta se solte.

Levante o guiador para fora e para cima até que este encaixe firmemente na posição vertical.

PASSO 2 - ABRIR E DESDOBRAR



Segure a coluna de direcção e localize o pequeno botão amarelo no lado do Lite e puxe-o para desbloquear o conjunto da roda dianteira.

Segure a coluna de direcção e o encosto do banco e separe-os. A scooter desdobra-se e ouve-se um clique quando se encaixa na posição aberta.

ETAPA 3 - CONTROLO FINAL DE SEGURANÇA



Assegure-se de que os fechos de bloqueio estão bem fixos à barra de aço, pressionando o pé sobre a placa de pé.



Verifique se a alavanca vermelha do travão magnético está na posição LOCKED para engatar o motor.

COMEÇAR



Para ligar a scooter, prima o botão cinzento por baixo do ecrã da bateria. Selecione (D) para Conduzir ou (R) para Marcha atrás e, em seguida, prima o acelerador de polegar para avançar.
Não se esqueça de recarregar a bateria quando o ecrã mostrar a cor âmbar.

COMO FUNCIONAR



Para transformar a scooter em bagagem rolante, puxe o guiador para cima e prima a alavanca amarela, fixando-a no segundo ponto de paragem.



Para carregar, ligue o cabo de alimentação à porta de carregamento situada na parte superior da coluna de direcção.



Para retirar a bateria, levante o trinco e puxe-o cuidadosamente para cima. A porta de carregamento está localizada na parte lateral da bateria.

COMO DOBRAR PARA GUARDAR


PASSO 1 - DOBRAR O ENCOSTO E A COLUNA DE DIRECÇÃO



Dobrar o encosto do banco para baixo contra a base do banco.



Prima e mantenha premido o pequeno trinco amarelo na parte da frente da coluna de direcção e, em seguida, dobre-o para baixo até que o guiador se encaixe no lugar, fixado pelo íman.

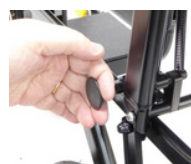

Com os apoios de braços montados, puxar a patilha preta para libertar o banco e rebater.

PASSO 2 - RECOLHER E BLOQUEAR A SCOOTER



Segure a scooter pela coluna de direcção e pela pega de transporte e levante a estrutura do assento para a posição vertical.



Incline a trotinete para trás num ângulo (pode usar o pé atrás da roda para a estabilizar, se necessário), equilibrando-a nos rodízios.



Pressione a coluna de direcção para dentro até que a roda dianteira e o trinco encaixem firmemente no lugar. Em seguida, empurre a coluna com firmeza para a bloquear firmemente contra a estrutura.



Este folheto destina-se a ser apenas um guia rápido. Para obter instruções completas, consulte o manual do utilizador do produto.

Se tiver alguma dúvida, contacte-nos através do número +44 800 915 0800 ou envie um e-mail para services@efoldi.com