



GUIA RÁPIDO- PORTUGUÊS



eFOLDi

Desdobrar a Scooter eFOLDi Lite


Antes de começar, coloque a scooter na vertical em um espaço aberto longe de animais de estimação e crianças pequenas.

Desdobrar a scooter é simples e com um pouco de prática você poderá configurá-la em segundos.

Aconselhamo-lo a praticar com a scooter antes de se aventurar pela primeira vez.



1 Solte a trava amarela da coluna de direção....

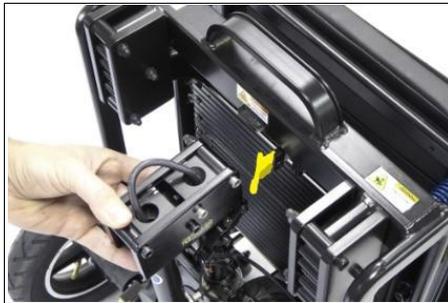

2 ...e deixe a coluna oscilar livremente.



3 Puxe o guidão para fora e para cima..



4 ...até que eles se encaixem em uma linha vertical.



5 Localize a pequena alavanca amarela na lateral e puxe para liberar o conjunto da roda dianteira.



6 Segure a coluna de direção e o encosto e separe-os...



7 a scooter se desdobrará quando você puxar o banco para trás e a coluna de direção e...



8 ...a scooter irá bloquear-se na sua posição aberta.



9 Certifique-se de que as travas de travamento estejam travadas na barra de aço...



10 ...se não, pressione o pé na plataforma para travar a scooter aberta.



11 Se ainda não estiver instalado, aplique as almofadas do assento e o encosto conforme mostrado.



12 Verifique se o freio magnético está na posição BLOQUEADO para engatar o motor.

Dobrar a Scooter eFOLDi Lite

1 Dobre o encosto do banco até a base do banco.	2 If the scooter has armrests pull the black toggle to release then fold backrest down as per (1)	3 Pressione e segure a pequena trava amarela na coluna de direção...
4 ...e dobre a coluna para baixo até é bloqueado pelo fecho magnético.	5 Segure firmemente a scooter pela coluna de direção e pela alça de transporte e pressione firmemente a coluna para baixo em direção à placa de pé	6 Incline a scooter para trás em um ângulo e use o pé atrás do volante para impedir que ela se afaste de você
7 ..pressione a coluna de direção para dentro até que a roda dianteira trave no lugar...	8 ...e a trava da coluna de direção trava na posição.	9 Pressione a coluna de direção para travá-la firmemente contra o quadro.

Operação eFOLDi Lite

Para ligar a scooter, pressione o botão cinza abaixo do display da bateria. Selecione (D) Drive ou (R) Reverse e pressione o acelerador para prosseguir.	A bateria pode ser carregada usando a porta de carregamento conforme mostrado. Sempre recarregue a bateria assim que possível quando o display estiver indicando âmbar.	A bateria pode ser removida levantando a trava e levantando a bateria para cima. Após a remoção, a bateria pode ser carregada usando o soquete na lateral da bateria.