



## QUICK GUIDE – PORTUGUÊS




eFOLDi

### Desdobrar a Scooter eFOLDi Lite

Antes de começar, coloque a scooter na vertical em um espaço aberto longe de animais de estimação e crianças pequenas.

Desdobrar a scooter é simples e com um pouco de prática você poderá configurá-la em segundos.

Aconselhamo-lo a praticar com a scooter antes de se aventurar pela primeira vez.

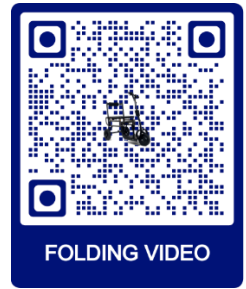

**1** Volte a trava da coluna de direção...

**2** ...e deixe a coluna oscilar livremente.

**3** Puxe o guidão para fora e para cima...



**4** ...até que eles se encaixem em uma linha vertical.

**5** Localize o pequeno batente preto na lateral e puxe para liberar o conjunto da roda dianteira.

**6** Segure a coluna de direção e o encosto e separe-os...



**7** ...a scooter se desdobrará quando você puxar o banco para trás e a coluna de direção...

**8** Separe...

**9** ...a scooter irá bloquear-se na sua posição aberta.












**10** Certifique-se de que as travas de travamento estejam travadas na barra de aço...

**11** ...se não, pressione o pé na plataforma para travar a scooter aberta.

**12** Verifique se o freio magnético está na posição **BLOQUEADO** para engatar o motor.

## Dobrar a Scooter eFOLDi Lite

		
<b>1</b> Dobre o encosto do banco até a base do banco.	<b>2</b> Pressione e segure a pequena trava na coluna de direção.	<b>3</b> ...e dobre a coluna para baixo até...
		
<b>4</b> ...é bloqueado pelo fecho magnético.	<b>5</b> Segure firmemente a scooter pela coluna de direção e pela alça de transporte e pressione firmemente a coluna para baixo em direção à placa de pé.	<b>6</b> Incline a scooter para trás em um ângulo e use o pé atrás do volante para impedir que ela se afaste de você.
		
<b>7</b> ...pressione a coluna de direção para dentro até que a roda dianteira trave no lugar.	<b>8</b> ...e a trava da coluna de direção trava na posição.	<b>9</b> Pressione a coluna de direção para travá-la firmemente contra o quadro.

## Operação eFOLDi Lite

		
A bateria pode ser removida levantando a trava e levantando para cima. Há um ponto de carregamento na lateral da bateria.	Para ligar a scooter, pressione o botão cinza abaixo do visor da bateria. Selecione (D) Drive ou (R) Reverse e pressione o acelerador de polegar para ir. <b>Sempre recarregue a bateria assim que possível quando o visor estiver indicando âmbar.</b>	Para transformar a scooter em bagagem rolante, certifique-se de que a coluna de direção vertical esteja travada contra a trava da coluna de direção.