



## QUICK GUIDE – PORTUGUÊS



eFOLDi

### Desdobrar a cadeira elétrica eFOLDi

Antes de começar, coloque a Power Chair em um espaço aberto, longe de animais de estimação e crianças pequenas.

O desdobraimento é simples e com um pouco de prática você poderá configurá-lo em segundos.

Aconselhamo-lo a praticar com a Power Chair antes de se aventurar pela primeira vez.



**1** As rodas anti-queda e o carregador de bateria são fornecidos com a sua cadeira elétrica.

**2** Instale as rodas anti-queda. Eles simplesmente pressionam e travam no lugar.

**3** Desdobre a cadeira elétrica simplesmente empurrando a parte inferior do assento para baixo enquanto puxa a alavanca de liberação para cima.



**4** Instale os apoios de braço nas ranhuras e pressione-os para baixo até que travem.  
**Mantenha os cabos afastados de pontos de esmagamento**

**5** Pegue a unidade controladora e a haste e...

**6** ...insira a haste do controlador no encaixe do apoio de braço sob o apoio de braço.



**7** ajuste a posição do controlador e aperte com o botão serrilhado.

**8** Remova o controle do atendente do bolso traseiro e prenda-o à barra na parte traseira.

**9** Puxe o apoio para os pés para baixo.



**10** Instale as almofadas do assento conforme mostrado. Estes são mantidos no lugar por abas de velcro. Certifique-se de que estão dobrados sobre o encosto e sob o assento.

**11** Insira as baterias até que se encaixem no lugar. Sua cadeira elétrica agora está pronta.

**12** Ligue a Power Chair pressionando o botão POWER. Consulte o seu manual para obter informações completas.

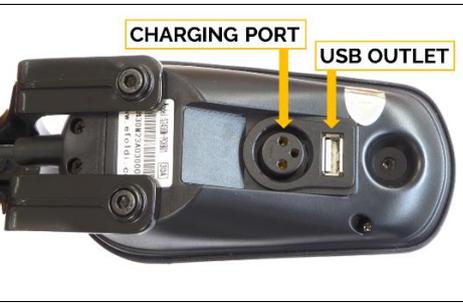
## Dobrando a cadeira elétrica eFOLDi

		
<b>1</b> Desligue a energia usando o botão POWER no controlador manual. <b>Sempre desligue a energia quando a cadeira não estiver em uso para economizar energia da bateria.</b>	<b>2</b> Afrouxe levemente o botão serrilhado e remova o controlador. Coloque o controlador e o cinto de segurança na almofada do assento. <b>Reaperte o botão para evitar perdas.</b>	<b>3</b> Remova o controle do atendente e coloque-o no bolso na parte de trás da cadeira.
		
<b>4</b> Verifique se as rodas dianteiras estão posicionadas à frente para garantir uma dobragem suave. Dica puxe a cadeira para trás para alinhar as rodas.	<b>5</b> Alcance a borda do assento e puxe a barra de liberação para cima para liberar o assento e...	<b>6</b> ...puxe o assento para cima e em sua direção para dobrar a cadeira elétrica. Dobre no apoio para os pés.

## Carregamento de bateria da cadeira elétrica eFOLDi

		
Para carregar a cadeira elétrica, conecte o cabo do carregador na base do controlador do joystick e conecte o plugue CA a uma tomada elétrica. Isso carregará <b>AMBAS</b> as baterias simultaneamente.	Para remover as baterias para viagem ou carregamento individual, pressione a lingueta vermelha para cima e deslize a bateria para trás.	As baterias podem ser carregadas separadamente da cadeira usando o adaptador curto 'pigtail' que precisa ser conectado primeiro ao cabo do carregador.

## Operação da cadeira elétrica eFOLDi

		
O controlador do monofone possui botões para ajustar a velocidade e visores para indicar a energia restante e a configuração de velocidade.  Você pode desativar a sirene de reversão pressionando o botão indicado.	A porta de carregamento da sua cadeira elétrica está localizada sob o monofone para carregar <b>AMBAS</b> as baterias simultaneamente.  Há também uma saída USB para alimentar um telefone ou outro dispositivo USB.	O controle do atendente pode ser configurado para ajustar a velocidade de caminhada de um atendente/responsável e também fornece uma verificação da bateria.  A alavanca controla o movimento para trás ou para a frente.