



QUICK GUIDE – PORTUGUÊS




eFOLDi

Desdobrar a cadeira elétrica eFOLDi

Antes de começar, coloque a Power Chair em um espaço aberto, longe de animais de estimação e crianças pequenas.

O desdobramento é simples e com um pouco de prática você poderá configurá-lo em segundos.

Aconselhamo-lo a praticar com a Power Chair antes de se aventurar pela primeira vez.

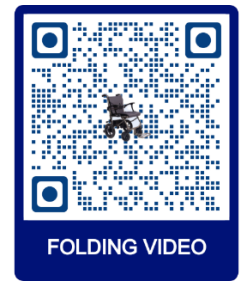

1

As rodas anti-queda e o carregador de bateria são fornecidos com a



2

Instale as rodas anti-queda, se desejar. Estes simplesmente pressionam e travam no lugar.



3

Desdobre a cadeira elétrica simplesmente empurrando a parte inferior do assento para baixo.



4

Mantenha o cabo do controlador longe de pontos de aperto, como os suportes do apoio de braço.



5

Instale os suportes do apoio de braço nos slots e pressione-os para baixo até travar.



6

Pegue a unidade controladora e...



7

...insira a haste do controlador no encaixe do apoio de braço sob o apoio de braço...



8

...ajuste a posição do controlador e aperte com o botão serrilhado



9

Remova o controle do assistente do bolso traseiro e prenda-o à barra na parte traseira.



10

Puxe o apoio para os pés para baixo.



11

Instale as almofadas do assento conforme mostrado. Estes são mantidos no lugar por abas de velcro...



12

...certifique-se de que estão dobrados sobre o encosto e sob o assento. A cadeira elétrica está pronta.

Dobrar a cadeira elétrica eFOLDi



1

Afrouxe levemente o botão serrilhado e remova o controlador.



2

Coloque o controlador e a alça do cinto de segurança no assento.



3

Remova o controle do assistente e coloque no bolso na parte traseira da cadeira.



4

Certifique-se de que ambos os apoios de braço estão na posição mais alta..



5

_ pressionando o pequeno botão prateado para ajustar os apoios de braços.



6

Verifique se as rodas dianteiras estão posicionadas à frente para garantir uma dobragem suave.
Dica puxe a cadeira para trás para alinhar as rodas



7

Em seguida, alcance a borda do assento e puxe a barra de liberação para liberar o assento e...



8

_ puxe o assento para cima para dobrar a Power Chair.



9

Dobre o apoio para os pés.

Operação da cadeira elétrica eFOLDi



As baterias podem ser removidas pressionando a aba vermelha para cima e puxando para trás.



Você liga a alimentação principal aqui, o que alimenta o controlador do monofone.

Sempre desligue isso quando a cadeira não estiver em uso para economizar



Ligue o controle do monofone.

O controlador do monofone possui botões para ajustar a velocidade e exibe para indicar a energia restante e a configuração de velocidade