



HITRI VODNIK - Slovenščina




eFOLDi

Odpiranje stola eFOLDi Power Chair

Preden začnete, postavite električni stol na odprt prostor stran od hišnih ljubljencev in majhnih otrok.

Razvijanje je preprosto in z malo vaje ga boste lahko postavili v nekaj sekundah.

Svetujemo vam, da vadite z električnim stolom, preden se prvič odpravite ven.

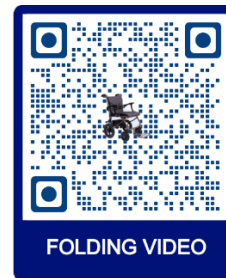

1 Kolesa proti prevrnitvi in polnilnik baterij so priloženi vašemu električnemu stolu.

2 Namestite kolesa proti prevrnitvi. Te preprosto pritisnete in se zaskočijo.

3 Raztegnite električni stol tako, da preprosto potisnete dno sedeža navzdol, medtem ko ročico za sprostitve povlečete navzgor.



4 Namestite opore za naslone za roke v reže in jih pritisnite navzdol, dokler se ne zaskočijo. **Držite kable stran od stisnjenih mest**

5 Vzemite krmilno enoto in palico ter ..

6 ..vstavite kontrolno palico v nastavek za naslon za roke pod naslonom za roke..



7 prilagodite položaj krmilnika in ga zategnite z narebrčnim gumbom.

8 .. Odstranite kontrolnik spremljevalca iz zadnjega žepa in ga pritrдите na drog zadaj.

9 Povlecite naslon za noge navzdol.



10 Namestite sedežne blazine, kot je prikazano. Te držijo na mestu ježki. Prepričajte se, da so zloženi nad naslonjalom in pod sedežem.

11 Vstavite baterije, dokler se ne zaskočijo. Vaš Power Chair je zdaj pripravljen.

12 Vključite Power Chair s pritiskom na gumb POWER. Za vse informacije glejte svoj priročnik.

Zložljiv električni stol eFOLDi

<p>1 Izklopite napajanje z gumbom POWER na ročnem upravljalniku. Vedno izklopite napajanje, ko stola ne uporabljate, da prihranite energijo baterije.</p>	<p>2 Rahlo popustite narebričen gumb in odstranite krmilnik. Postavite krmilnik in varnostni pas na sedežno blazino. Ponovno privijte gumb, da preprečite izgubo.</p>	<p>3 Odstranite kontrolnik spremljevalca in ga položite v žep na zadnji strani stola.</p>
<p>4 Preverite, ali so sprednja kolesa nameščena naprej, da zagotovite gladko zlaganje. Namig povlecite stol nazaj, da poravnate kolesa</p>	<p>5 Sezite pod rob sedeža in povlecite sprostitevno palico navzgor, da sprostite sedež in...</p>	<p>6 ...povlecite sedež navzgor in proti sebi, da zložite električni stol. Zložite naslon za noge.</p>

Polnjenje baterije električnega stola eFOLDi

<p>Za polnjenje električnega stola priključite kabel polnilnika v podnožje krmilne palice in priključite AC vtič v električno vtičnico. To bo polnilo OBE bateriji hkrati.</p>	<p>Če želite odstraniti baterije za potovanje ali individualno polnjenje, pritisnite rdeči jeziček navzgor in baterijo potisnite nazaj.</p>	<p>Baterije se lahko polnijo ločeno od stola z uporabo kratkega adapterja 'pigtail', ki ga je treba najprej priključiti na kabel polnilnika.</p>

eFOLDi Power Chair Operation

	<p>CHARGING PORT</p> <p>USB OUTLET</p>	
<p>Upravljalnik slušalke ima gumba za prilagajanje hitrosti in zaslone, ki prikazujejo preostalo moč in nastavitvev hitrosti.</p> <p>Zvok za vzvratno vožnjo lahko onemogočite s pritiskom na prikazano tipko.</p>	<p>Polnilni priključek za vaš Power Chair se nahaja pod slušalko za polnjenje OBEH baterij hkrati.</p> <p>Na voljo je tudi USB vtičnica za napajanje telefona ali druge USB naprave.</p>	<p>Nadzor spremljevalca je mogoče nastaviti tako, da prilagodi hitrost hoje za spremljevalca/skrbnika, omogoča pa tudi preverjanje baterije.</p> <p>Ročica nadzoruje gibanje nazaj ali naprej.</p>