



HITRI VODNIK - Slovenščina




eFOLDi

Odpiranje stola eFOLDi Power Chair

Preden začnete, postavite električni stol na odprt prostor stran od hišnih ljubljencev in majhnih otrok.

Razvijanje je preprosto in z malo vaje ga boste lahko postavili v nekaj sekundah.

Svetujemo vam, da vadite z električnim stolom, preden se prvič odpravite ven.

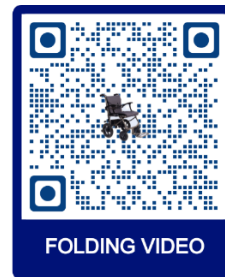

1 Kolesa proti prevrnitvi in polnilnik za baterije so priložena vašemu stolu Power Chair.

2 Po želji namestite kolesa proti prevrnitvi. Te preprosto pritisnete in zaskočite na svoje mesto.

3 Raztegnite električni stol tako, da preprosto potisnete spodnji del sedeža navzdol.



4 Krmilni kabel naj bo proč od točk stiskanja, kot so nosilci naslona za roke.

5 Namestite opore za naslone za roke v reže in jih pritisnite navzdol, da se zaskočijo.

6 Vzemite krmilno enoto in...



7 ...vstavite krmilno palico v nastavek naslona za roke pod naslonom za roke ...

8 ...nastavite položaj krmilnika in ga zategnite z narebričastim gumbom.

9 Odstranite nadzorni upravljalnik iz zadnjega žepa in ga pritrdite na palico na zadnji strani.



10 Povlecite naslon za noge navzdol.

11 Namestite sedežne blazine, kot je prikazano. Te držijo na mestu z ježki ...

12 ...prepričajte se, da sta zložena čez naslonjalo in pod sedež. Električni stol je zdaj pripravljen.

Zlaganje stola eFOLDi Power Chair



1 Rahlo popustite narebričen gumb in odstranite krmilnik.



2 Namestite krmilnik in pas za varnostni pas na sedež.



3 Odstranite nadzorni nadzor in ga položite v žep na zadnjem delu stola.



4 Prepričajte se, da sta oba naslonjala za roke nastavljena v najvišji položaj ...



5 ... s pritiskom na majhen srebrn gumb za nastavev naslonov za roke.



6 Preverite, ali so sprednja kolesa nameščena naprej, da zagotovite gladko zlaganje.
Namig povlecite stol nazaj, da poravnate kolesa



7 Nato sežite pod rob sedeža in povlecite sprostitveni drog navzgor, da sprostite sedež in...



8 ...potegnite sedež navzgor, da zložite električni stol.



9 Zložite naslon za noge.

eFOLDi Power Chair Delovanje



Baterije lahko odstranite tako, da rdeč jeziček pritisnete navzgor in povlečete nazaj.



Tukaj vklopite glavno napajanje, ki napaja krmilnik slušalke.

To vedno izklopite, ko stola ne uporabljate, da prihranite energijo baterije.



Vklopite krmilnik slušalke.

Krmilnik slušalke ima gumbes za prilagajanje hitrosti in zaslone, ki prikazujejo preostalo moč in nastavev hitrosti