



## GUÍA RÁPIDA





eFOLDi

### Despliegue del scooter eFOLDi Explorer

Antes de comenzar, coloque el scooter en posición vertical en un espacio abierto lejos de mascotas y niños pequeños.

Desplegar el scooter es sencillo, con un poco de práctica podrás configurarlo en segundos.

Te aconsejamos que practiques con el patinete antes de aventurarte por primera vez.

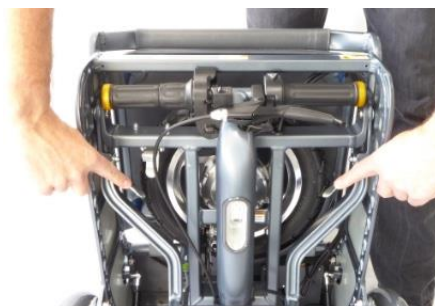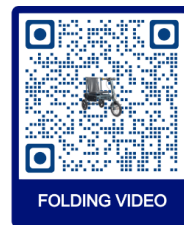

1

Ubique los pestillos 'B' y 'C'.



2

Mantenga presionados los pestillos 'B' y 'C' y...



3

...jale el asa de arrastre/transporte hacia arriba.



4

Suelte el manillar tirando hacia usted.



5

Mientras empuja el manillar hacia abajo y hacia adentro, suelte el pestillo 'E'.



6

Tire de la columna de dirección hacia arriba y sobre el asa de transporte hasta que encaje en su lugar.



7

Suelte la rueda delantera tirando bruscamente o girando.



8

Baje el scooter al suelo sujetándolo con cuidado.



9

Tire de la columna de dirección hacia arriba...



10

...y asegúrese de que la llave de la columna encaje en su lugar debajo del pestillo 'A'.



11

Tire del respaldo del asiento en posición vertical.



12

Empuje los reposapiés hacia abajo. Su scooter ya está listo.

Tenga en cuenta que este folleto pretende ser solo una guía rápida. Para obtener instrucciones completas, consulte nuestro manual de usuario del producto. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 0800 915 0800 o envíe un correo electrónico a [hello@efoldi.com](mailto:hello@efoldi.com)

## Plegado de la scooter eFOLDi Explorer

1	Doble los reposapiés a una posición vertical.	2	Doble el respaldo del asiento hacia abajo.	3	Presione y suelte el pestillo 'A'.
4	Pliegue la columna de dirección contra el asiento.	5	Levante el scooter a una posición vertical.	6	Asegúrese de que la rueda delantera esté plana y bloqueada en el marco por su imán.
7	Localice el pestillo 'D'.	8	Mientras sostiene la columna de dirección, presione el pestillo 'D'...	9	...y coloque la columna de dirección sobre el asa de transporte.
10	Presione la columna de dirección contra el marco hasta que se traben el pestillo 'E'.	11	Presione los manillares contra el marco hasta que el imán los bloquee en su lugar.	12	Mantenga presionados los pestillos 'B' y 'C' y pliegue el asa de transporte hacia abajo.

## La batería eFOLDi Explorer

La batería tiene puntos para cargar y para alimentar un dispositivo móvil.	Retire la batería desbloqueando con la llave y aplicando una presión suave.	<b>SIEMPRE</b> recargue la batería cada 3 meses y/o el indicador muestre 24 o menos.

