



## GUÍA RÁPIDA – ESPAÑOL




eFOLDi

### Despliegue del scooter eFOLDi Lite

Antes de comenzar, coloque el scooter en posición vertical en un espacio abierto lejos de mascotas y niños pequeños.

Desplegar el scooter es sencillo y con un poco de práctica podrás configurarlo en segundos.

Te aconsejamos que practiques con el patinete antes de aventurarte por primera vez.

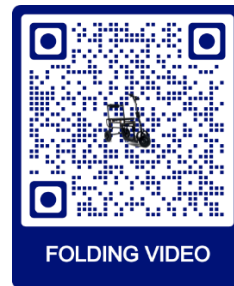

FOLDING VIDEO



1 Suelte el pestillo de la columna de dirección...



2 ...y permita que la columna oscile libremente.



3 Tire del manillar hacia afuera y hacia arriba...



4 ...hasta que encajen en una línea vertical.



5 Ubique el pequeño tope amarillo en el costado y tire para liberar el conjunto de la rueda delantera.



6 sostenga la columna de dirección y el respaldo del asiento y sepárelos...



7 ...el scooter se desplegará cuando separe el respaldo del asiento y la columna de dirección y...



8 ...el scooter se bloqueará en su posición abierta.



9 asegúrese de que los pestillos de bloqueo se hayan bloqueado en la barra de acero...



10 ...si no, presione su pie hacia abajo sobre el reposapiés para bloquear el scooter abierto.












11 Si aún no está instalado, coloque los cojines y el respaldo del asiento como se muestra.



12 Verifique que el freno magnético esté en la posición **BLOQUEADO** para engranar el motor.

## Plegado del scooter eFOLDi Lite

		
<p><b>1</b> Doble el respaldo del asiento hacia la base del asiento.</p>	<p><b>2</b> Mantenga presionada la pequeña traba amarilla en la columna de dirección...</p>	<p><b>3</b> ...y dobla la columna hacia abajo hasta que...</p>
		
<p><b>4</b> ... Está bloqueado por la captura magnética.</p>	<p><b>5</b> Sostenga firmemente el scooter por la columna de dirección y el asa de transporte y presione con firmeza la columna hacia el reposapiés</p>	<p><b>6</b> Incline el scooter hacia atrás en ángulo y use su pie detrás del volante para evitar que se aleje de usted.</p>
		
<p><b>7</b> ...presione hacia adentro la columna de dirección hasta que la rueda delantera encaje en su lugar...</p>	<p><b>8</b> ...y el pestillo de la columna de dirección se bloquea en su posición.</p>	<p><b>9</b> Presione la columna de dirección para bloquearla firmemente contra el bastidor.</p>

## Operación eFOLDi Lite

		
<p>La batería se puede quitar levantando el pestillo y levantando hacia arriba.</p> <p>Hay un punto de carga en el lateral de la batería.</p>	<p>Para encender el scooter, presione el botón gris debajo de la pantalla de la batería.</p> <p>Seleccione (D) Conducir o (R) Marcha atrás y presione el acelerador manual para continuar.</p> <p><b>Siempre recargue la batería tan pronto como sea posible cuando la pantalla está indicando ámbar.</b></p>	<p>Para convertir el scooter en un equipaje con ruedas, asegúrese de que la columna de dirección vertical esté bloqueada contra el pestillo de la columna de dirección.</p>

Tenga en cuenta que este folleto pretende ser solo una guía rápida. Para obtener instrucciones completas, consulte nuestro manual de usuario del producto. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 0800 915 0800 o envíe un correo electrónico a [hello@efoldi.com](mailto:hello@efoldi.com)