

eFOLDi Explorer Schnellstartanleitung




Stellen Sie den eFOLDi Explorer vor der Benutzung in einem offenen Bereich auf, der von Haustieren und kleinen Kindern ferngehalten wird. Das Entfalten ist einfach, und mit etwas Übung können Sie ihn in Sekundenschnelle aufstellen. Wir empfehlen, vor Ihrem ersten Ausflug zu üben.



WIE ENTFALTEN

SCHRITT 1 - ZUSAMMENBAU ZUM ROLLGEPÄCK

Entfernen Sie alle Verpackungen, bevor Sie beginnen. Das Ladegerät befindet sich in der Styroporhülle und die Schlüssel sind in der Explorer-Sitzrückentasche.

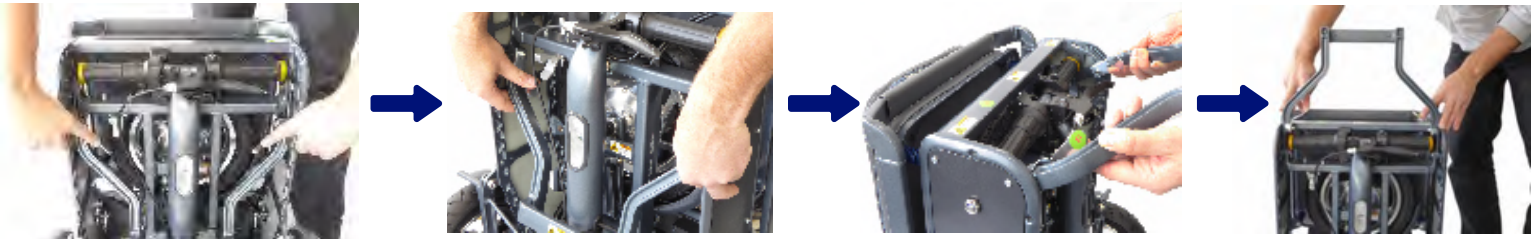

Suchen Sie die Verriegelungen „B“ und „C“. Drücken Sie darauf und ziehen Sie den Zieh-/Tragebügel in seine aufrechte Position.

SCHRITT 2 - LÖSEN DER LENKSÄULE



Lösen Sie den Lenker, indem Sie ihn zu sich heranziehen.

Drücken Sie den Lenker nach unten und nach innen und lösen Sie dabei die Verriegelung „E“.

Ziehen Sie die Lenksäule nach oben und über den Tragegriff, bis sie einrastet.

Lösen Sie das Vorderrad durch einen kräftigen Zug oder eine Drehung.

SCHRITT 3 - AUFKLAPPEN UND VERRIEGELN



Ziehen Sie das Rad in die vordere Position und senken Sie den Scooter vorsichtig auf den Boden ab.

Ziehen Sie die Lenksäule nach oben und vergewissern Sie sich, dass der Säulenschlüssel unter der Verriegelung „A“ einrastet.

Stellen Sie den Sitz aufrecht und drücken Sie die Fußrasten nach unten.

ERSTE SCHRITTE

BEDIENUNGSANLEITUNG



Zum Aufladen schließen Sie das Stromversorgungskabel an den Ladeanschluss an der Batterie an. Außerdem gibt es einen USB-Anschluss zum Laden und Betreiben eines Mobiltelefons.

Um den Akku zu entfernen, entriegeln Sie ihn mit dem Schlüssel und heben ihn vorsichtig nach oben.

*Schlüssel in grauer Sitztasche gefunden

Um den Roller einzuschalten, stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn von der 9- bis 11-Uhr-Position. Der Drehgashebel befindet sich am rechten Griff. Die Bremse ist manuell und befindet sich neben dem linken Griff. Die Spannung wird auf dem digitalen Display angezeigt. Denken Sie daran, alle 3 Monate aufzuladen oder wenn die Anzeige 24 Volt oder weniger anzeigt.

SCHRITT 1 - UMKLAPPEN DER RÜCKENLEHNE UND DER LENKSÄULE

WIE FALTEN



Klappen Sie den Sitz nach unten und die Fußrasten in eine aufrechte Position.



Drücken Sie auf den Riegel „A“ und lassen Sie ihn los, um die Lenksäule flach gegen den Sitz zu klappen.



Heben Sie den Roller in eine aufrechte Position und arretieren Sie das Vorderrad flach auf seinem Magneten im Rahmen.



Suchen Sie die Verriegelung „D“ und drücken Sie darauf, während Sie die Lenksäule abstützen.


SCHRITT 2 - ZUSAMMENKLAPPEN UND VERRIEGELN DES SCOOTERS




Senken Sie die Lenksäule über den Tragegriff ab.



Drücken Sie die Lenksäule in den Rahmen, bis der Riegel „E“ einrastet.

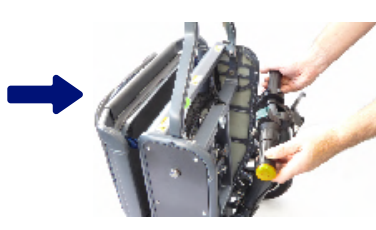

Drücken Sie den Lenker gegen den Rahmen, bis der Magnet ihn einrastet.

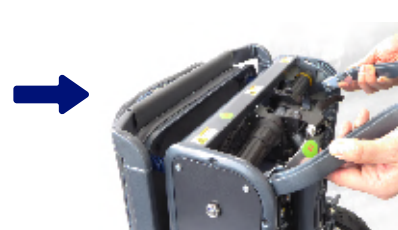

Drücken und halten Sie die Riegel „B“ und „C“ und klappen Sie den Tragegriff nach unten.

Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt nur als Kurzanleitung gedacht ist. Eine vollständige Anleitung finden Sie in unserem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter +44 800 915 0800 an oder senden Sie eine E-Mail an services@efoldi.com.