

eFOLDi Explorer Snelstartgids




Plaats de eFOLDi Explorer voor gebruik op een open plek, uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen. Uitvouwen is eenvoudig en met wat oefening zet je hem in een paar seconden op. We raden u aan te oefenen voor uw eerste uitstapje.



HOE ONTVOUWEN


STAP 1 - IN ELKAAR ZETTEN TOT ROLLENDE BAGAGE

Verwijder alle verpakking voordat u begint. De oplader zit in de polystyreen hoes en de sleutels zitten in de tas van de Explorer rugleuning.

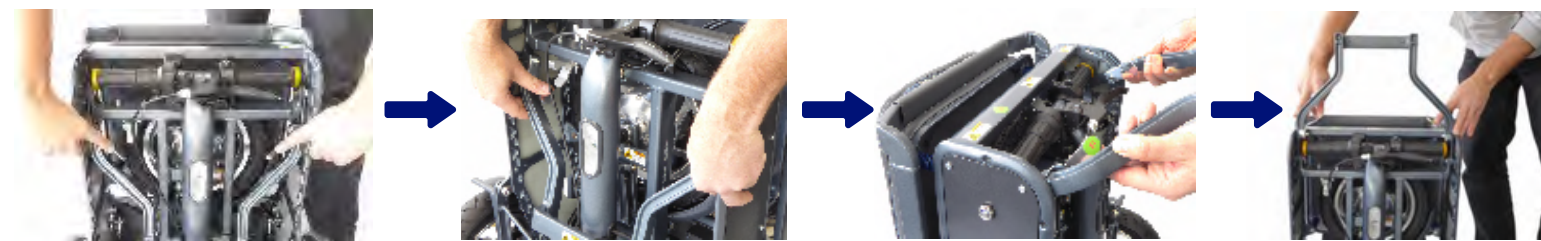

Zoek de vergrendelingen "B" en "C". Druk ze in en trek de sleep-/draaghendel rechtop.

STAP 2 - DE STUURKOLOM LOSMAKEN

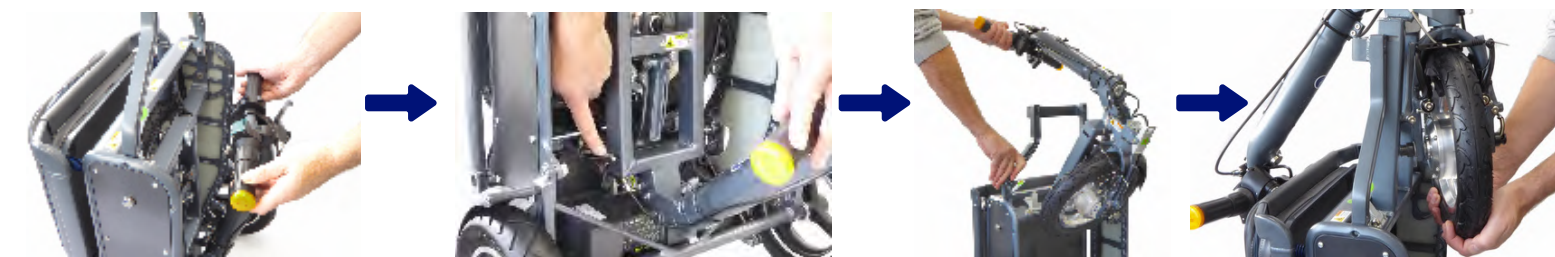

Maak het stuur los door het naar je toe te trekken.

Terwijl u het stuur omlaag en naar binnen duwt, maakt u de "E"-vergrendeling los.

Trek de stuurkolom omhoog en over de draagbeugel totdat deze vastklikt.

Maak het voorwiel los met een scherpe ruk of draai.

STEP 3 - UNFOLD AND LOCK



Trek het wiel naar voren en laat de step voorzichtig op de grond zakken.

Trek de stuurkolom rechtop en controleer of de stuurkolomsleutel vastklikt onder vergrendeling "A".

Pull the seat upright and push the foot pegs down.

AAN DE SLAG

HOE TE BEDIENEN



Om de scooter aan te zetten, steekt u de sleutel in het slot en draait u met de klok mee van de 9 tot 11 uur-positie. De draaigashendel zit op het rechterhandvat. De rem is handmatig en bevindt zich naast het linkerhandvat. De spanning wordt weergegeven op het digitale display. Vergeet niet om de 3 maanden op te laden of wanneer de meter 24v of minder aangeeft.



Om op te laden sluit je de voedingskabel aan op de oplaadpoort op de batterij. Er is ook een USB-poort voor het opladen en voeden van een mobiele telefoon.



Om de batterij te verwijderen, ontgrendelt u met de sleutel en tilt u deze voorzichtig omhoog.

*Sleutels gevonden in grijze stoelzak

HOE OPVOUWEN EN OPBERGEN

STAP 1 - KLAP DE RUGLEUNING & STUURKOLOM IN



Klap het zadel naar achteren en de voetsteunen rechtop.



Druk vergrendeling "A" in en laat deze los, waarbij de stuurkolom plat tegen de stoel wordt geklapd.



Til de step rechtop en vergrendel het voorwiel plat op zijn magneet in het frame.



Zoek vergrendeling "D" en druk deze in terwijl u de stuurkolom ondersteunt.

STAP 2 - DE SCOOTER INKLAPPEN EN VERGRENDELEN



Laat de stuurkolom over de draagbeugel zakken.



Druk de stuurkolom in het frame totdat vergrendeling "E" vastklikt.



Druk het stuur tegen het frame tot de magneet ze vastzet.



Houd de vergrendelingen "B" en "C" ingedrukt en klap de draagbeugel omlaag.

Let op: deze bijsluiter is alleen bedoeld als een beknopte handleiding. Raadpleeg voor volledige instructies onze producthandleiding. Als u vragen hebt, bel ons dan op +44 800 915 0800 of stuur een e-mail naar services@efoldi.com.