




Placera eFOLDi Lite på en öppen plats, utom räckhåll för husdjur och små barn, innan du börjar använda den. Det är lätt att fälla ut och med lite övning kan du ställa upp den på några sekunder.

Vi rekommenderar att du övar före din första utflykt.

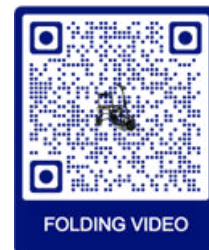

HUR MAN VIKER UPP

STEG 1 - LOSSA RATTSTÅNGEN

Ta bort allt emballage innan du börjar.



Tryck på den gula spärren för att frigöra rattstången, så att den kan svänga fritt.

Lyft styret utåt och uppåt tills det klickar fast i vertikalt läge.

STEG 2 - LÅS UPP OCH VIK UT



Håll i rattstången och leta reda på den lilla gula knappen på sidan av Lite och dra i den för att låsa upp framhjulsenheten.

Håll i rattstången och ryggstödet och dra isär dem. Scootern fälls ut och du hör ett klick när den låses i sitt öppna läge.

STEG 3 - SLUTLIGA SÄKERHETSKONTROLLER



Se till att låsspärrarna är ordentligt fastsatta på stålstången genom att trycka ner foten på fotplattan.

Kontrollera att den röda magnetbromsspaken är i LOCKED-läge för att koppla in motorn.

KOMMA IGÅNG



Sätt på scootern genom att trycka på den grå knappen under batteriskärmen. Välj (D) för körning eller (R) för backning och tryck sedan på tumreglaget för att köra. Var noga med att ladda batteriet när displayen visar gult.

HUR MAN ANVÄNDER



För att förvandla scootern till rullande bagage drar du upp styret och trycker på den gula spaken, så att den säkras på den andra stoppunkten.



För att ladda, anslut strömförsörjningskabeln till laddningsporten som sitter högst upp på rattstången.



Ta ut batteriet genom att lyfta på spärren och försiktigt dra det uppåt.

Laddningsporten är placerad på sidan av batteriet.

HUR MAN VIKER


STEG 1 - FÄLL RYGGSTÖDET OCH RATTSTÅNGEN



Fäll ner ryggstödet platt mot sätesunderlaget.



Tryck och håll in den lilla gula spärren på framsidan av rattstången och fäll sedan ner den till styret tills de klickar på plats och säkras av magneten.

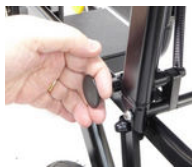

Med armstöd monterade, dra i den svarta spaken för att lossa sätet och fälla det.

STEG 2 - FÄLL IHOP OCH LÅS SCOOTERN



Ta tag i scooterns rattstång och bärhandtag och lyft sätesramen till upprätt läge.



Luta scootern bakåt i en vinkel (du kan använda foten bakom hjulet för att hålla den stadigt om det behövs) och balansera den på hjulen.



Tryck rattstången inåt tills framhjulet och spärren klickar säkert på plats. Tryck sedan hårt på rattstången för att låsa den tätt mot ramen.



Observera att denna broschyr endast är avsedd att vara en snabbguide. För fullständiga instruktioner, se vår produkthandbok. Om du har några frågor, vänligen ring oss på +44 800 915 0800 eller skicka ett e-postmeddelande till services@efoldi.com