

eFOLDi® Navigator hurtig start-guide



Før brug skal eFOLDi Navigator placeres i et åbent område væk fra kæledyr og små børn. Det er nemt at folde den ud, og med lidt øvelse kan du sætte den op på få sekunder.

Vi anbefaler, at du øver dig inden din første tur.



SÅDAN FOLDER DU UD



Din eFOLDi Navigator har en tilbehørstaske. Indeni finder du anti-tip-hjulene, en batterioplader og valgfrie håndtag.



Læg yderkartonen fladt ned, og fjern al emballage fra Navigator før montering.



Stil stolen op, og løsn sikkerhedsselen, der holder stolen i sammenklappet position.



Fold stolen ud ved at skubbe sædet ned.



Sæt antitip-hjulene ind bag på stolens stel med de fjedrende knapper vendt indad.



Monter armene ved at skubbe dem ned, indtil du hører et klik, og den røde knap låser.



Sæt joystickstangen ind under armlænet, og spænd knappen godt fast.



Monter ledsagerhåndtagene ved at skrue dem fast i toppen af stolens ramme.



Sæt ledsagerkontrollen fast på toppen af stolens ramme.



Tilslut strømkablet til batteriet ved at skubbe portdækslet af og sætte strømkablet i.



Skub fodstøtten ned.



Placer den skridsikre pude på sædet (med den bobbete side nedad), og fastgør den med velcrobåndene.



De røde bremsehåndtag er indstillet i fremadrettet position, som aktiverer motoren. For frihjulstilstand skal du trække begge håndtag i bagudgående position.



Tænd for tænd/sluk-knappen, se brugervejledningen for mere information.

KLAR TIL RUL!




Handsættets controller har knapper til at justere hastigheden med 5 effektniveauer og 5 hastighedsindstillinger (1 = lav, 5 = høj). For at deaktivere baklyden skal du blot trykke på knappen (vist ovenfor).



Ledsagerkontrollen justerer ganghastigheden for din assistent og giver mulighed for batteritjek med et håndtag til frem- og tilbagegående bevægelse.

BATTERI- OPLADNING

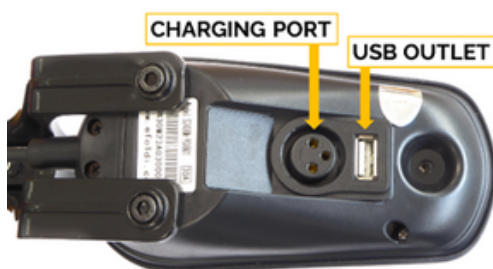

Opladningsporten sidder under handsættet, og der er også et USB-stik til at forsyne enheder med strøm.



For at oplade eFOLDi Navigator skal du sætte opladeren i joysticket's base og tilslutte vekselstrømsstikket til en stikkontakt. Alternativt kan du tage batteriet ud og oplade det separat - og lade stolen blive i bilen, hvis det er nødvendigt.

SÅDAN FOLDER DU



Brug POWER-knappen på håndbetjeningen til at slukke for stolen, når den ikke er i brug, for at spare på batteri.



Fold fodstøtten op.



Tryk på foldehåndtaget (placeret under sædets forkant), og løft sædet for at folde det bagud.



Sæt stolen tilbage på de tipsikre hjul, når den skal opbevares.



Bemærk, at denne folder kun er tænkt som en hurtig vejledning. For fuldstændige instruktioner henvises til vores produktmanual. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på +44 800 915 0800 eller sende en e-mail til hello@efoldi.com.

eFOLDi 