



Antes de utilizarlo, coloque el eFOLDi Navigator en una zona abierta, lejos de animales domésticos y niños pequeños. Desplegarlo es fácil y, con la práctica, podrá montarlo en segundos. Recomendamos practicar antes de la primera salida.



CÓMO DESDOBLAR



Su eFOLDi Navigator dispone de una bolsa de accesorios. En su interior encontrará las ruedas antivuelco un cargador de batería y asas opcionales.

Coloque la caja de cartón exterior en posición horizontal y retire todo el embalaje del Navigator antes de montarlo.



Ponga la silla de pie y desabroche el clip del cinturón de seguridad que sujeta la silla en su posición plegada.



Despliegue la silla empujando el asiento hacia abajo.



Inserte las ruedas antivuelco en la parte posterior del armazón de la silla con los botones elásticos hacia dentro.

Instale los brazos empujándolos hacia abajo hasta que oiga un clic y el botón rojo se bloquee.



Introduzca la varilla del joystick bajo el reposabrazos y apriete bien el pomo.



Instale los asideros atornillándolos en la parte superior del armazón de la silla.

Fije el control del acompañante en la parte superior del armazón de la silla.



Conecta el cable de alimentación a la batería deslizando la tapa del puerto e insertando el cable de alimentación.



Empuje el reposapiés hacia abajo.

Coloque el cojín antideslizante en el asiento (con el lado bobinado hacia abajo) y fíjelo con las lengüetas de velcro.



Las palancas de freno rojas se colocan en la posición hacia delante, que engrana el motor. Para el modo de rueda libre, tire de ambas palancas hacia atrás.



Encienda el botón de encendido, consulte el manual del usuario para obtener más información.

LISTO PARA ¡RODAR!




El mando dispone de botones para ajustar la velocidad, con 5 niveles de potencia y 5 ajustes de velocidad (1 = baja, 5 = alta).

Para desactivar el sonido de marcha atrás, basta con pulsar el botón (mostrado arriba).



El control del asistente ajusta la velocidad de marcha para su ayudante y proporciona una comprobación de la batería, con una palanca para avanzar y retroceder.

CARGA DE LA BATERÍA

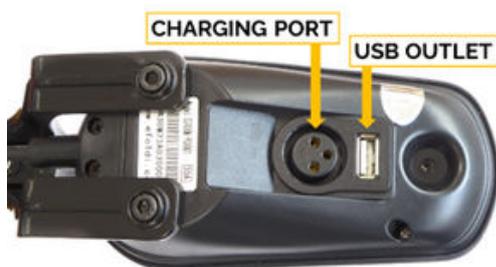

El puerto de carga está debajo del teléfono, y también hay una toma USB para alimentar dispositivos.



Para cargar el eFOLDi Navigator, enchufe el cargador a la base del joystick y conecte el enchufe de CA a una toma de corriente.

También puedes extraer la batería y cargarla por separado, dejando la silla en el coche si es necesario.

CÓMO PLEGAR PARA GUARDAR



Utilice el botón POWER del mando para apagar la silla cuando no la utilice y ahorrar batería.



Pliegue el reposapiés hacia arriba.



Presione la palanca de plegado (situada bajo el borde delantero del asiento) y levante el asiento para plegarlo hacia atrás.



Vuelve a colocar la silla sobre las ruedas antivuelco para guardarla.



Tenga en cuenta que este folleto es sólo una guía rápida. Para obtener instrucciones completas, consulte nuestro manual de usuario del producto. Si tiene alguna pregunta, llámenos al +44 800 915 0800 o envíe un correo electrónico a hello@efoldi.com.