

eFOLDi® Guide de démarrage rapide du navigateur



Avant de l'utiliser, placez l'eFOLDi Navigator dans un endroit ouvert, à l'écart des animaux domestiques et des jeunes enfants.
Le dépliage est facile et, avec de l'entraînement, vous pouvez l'installer en quelques secondes.
Nous vous recommandons de vous entraîner avant votre première sortie.



COMMENT DÉPLIER

Votre eFOLDi Navigator dispose d'un sac d'accessoires. Vous y trouverez les roues anti-bascullement, un chargeur de batterie et des poignées optionnelles.



Posez le carton extérieur à plat et retirez tous les emballages du Navigator avant de l'assembler.



Mettez le fauteuil debout et défaites l'attache de la ceinture de sécurité qui maintient le fauteuil en position pliée.



Dépliez la chaise en poussant le siège vers le bas.



Insérez les roues anti-bascullement à l'arrière du châssis de la chaise avec les boutons à ressort tournés vers l'intérieur.



Installez les bras en les poussant vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que le bouton rouge se verrouille.



Insérez la tige du joystick sous l'accoudoir et serrez le bouton très fermement.



Installez les poignées d'accompagnement en les vissant dans la partie supérieure du cadre de la chaise.



Fixer la commande de l'accompagnateur en haut du cadre du fauteuil.



Connectez le câble d'alimentation à la batterie en faisant glisser le couvercle du port et en insérant le câble d'alimentation.



Pousser le repose-pieds vers le bas.



Placez le coussin antidérapant sur le siège (côté bobo vers le bas), en le fixant à l'aide des bandes velcro.



Les leviers de frein rouges sont placés en position avant, ce qui engage le moteur. Pour le mode roue libre, tirez les deux leviers en position arrière.



Allumez le bouton d'alimentation, reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour plus d'informations.



PRÊT POUR ROULER !




La télécommande comporte des boutons permettant de régler la vitesse, avec 5 niveaux de puissance et 5 réglages de vitesse (1 = faible, 5 = élevée).

Pour désactiver le son d'inversion, il suffit d'appuyer sur le bouton (illustré ci-dessus).



La commande de l'accompagnateur permet de régler la vitesse de marche de l'accompagnateur et de vérifier la batterie, avec un levier pour avancer et reculer.

CHARGE DE LA BATTERIE

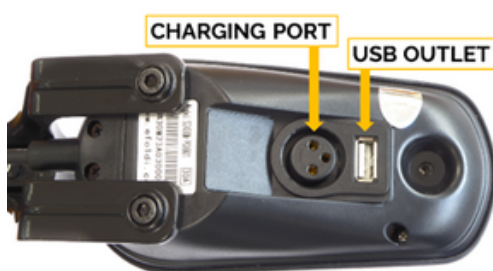

Le port de charge se trouve sous le combiné, et il y a également une prise USB pour alimenter les appareils.



Pour recharger l'eFOLDi Navigator, branchez le chargeur sur la base du joystick et branchez la prise secteur sur une prise électrique. Vous pouvez également retirer la batterie et la recharger séparément, en laissant le fauteuil dans votre voiture si nécessaire.

COMMENT PLIER



Utilisez le bouton POWER de la télécommande pour éteindre le fauteuil lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'économiser la batterie.



Relever le repose-pieds.



Appuyez sur le levier de pliage (situé sous le bord avant du siège) et soulevez le siège pour le plier vers l'arrière.



Reposez le fauteuil sur les roues anti-basculement pour le ranger.



Veuillez noter que ce dépliant n'est qu'un guide rapide. Pour des instructions complètes, veuillez vous référer à notre manuel d'utilisation.

Si vous avez des questions, appelez-nous au +44 800 915 0800 ou envoyez-nous un courriel à hello@efoldi.com.