



Prima dell'uso, posizionare il navigatore eFOLDi in un'area aperta, lontano da animali domestici e bambini piccoli. Svolgere il navigatore è facile e, con un po' di pratica, è possibile installarlo in pochi secondi. Si consiglia di fare pratica prima della prima uscita.



COME SVOLGERE



Il vostro eFOLDi Navigator è dotato di una borsa per gli accessori. Al suo interno troverete le ruote antiribaltamento, un caricabatterie e le maniglie opzionali.



Prima di montare il Navigator, stendere il cartone esterno e rimuovere tutti gli imballaggi.



Alzate la sedia e allentate la clip della cintura di sicurezza che fissa la sedia in posizione ripiegata.



Aprire la sedia spingendo il sedile verso il basso.



Inserire le ruote antiribaltamento nella parte posteriore del telaio della sedia con i bottoni a pressione rivolti verso l'interno.

Installare i bracci spingendoli verso il basso finché non si sente uno scatto e il pulsante rosso si blocca.



Inserire l'asta del joystick sotto il bracciolo e serrare saldamente la manopola.



Installare le maniglie dell'accompagnatore avvitandole nella parte superiore del telaio della sedia.

Fissare il comando dell'assistente alla parte superiore del telaio della sedia.



Collegare il cavo di alimentazione alla batteria facendo scorrere il coperchio della porta e inserendo il cavo di alimentazione.



Spingere il poggiatesta verso il basso.

Posizionare il cuscino antiscivolo sul sedile (con il lato ribollente rivolto verso il basso), fissandolo con le linguette in velcro.



Le leve rosse del freno sono posizionate in avanti, in modo da bloccare il motore. Per la modalità a ruota libera, tirare entrambe le leve in posizione arretrata.



Accendere il pulsante di alimentazione; per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso.

PRONTO A ROTOLARE!




Il telecomando dispone di pulsanti per la regolazione della velocità, con 5 livelli di potenza e 5 impostazioni di velocità (1 = bassa, 5 = alta).

Per disattivare il suono di retromarcia, è sufficiente premere il pulsante (mostrato sopra).



Il comando dell'assistente regola la velocità di deambulazione per l'assistente e fornisce un controllo della batteria, con una leva per il movimento in avanti e all'indietro.

CARICA DELLA BATTERIA

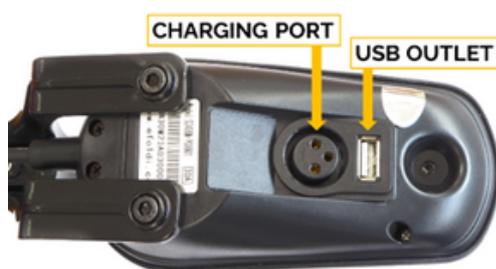

La porta di ricarica si trova sotto il portatile e c'è anche una presa USB per alimentare i dispositivi.



Per caricare eFOLDi Navigator, inserire il caricabatterie nella base del joystick e collegare la spina CA a una presa di corrente. In alternativa, è possibile rimuovere la batteria e caricarla separatamente, lasciando la sedia in auto, se necessario.

COME PIEGARE PER RIPORRE



Utilizzare il pulsante POWER sul controller manuale per spegnere la poltrona quando non viene utilizzata, per risparmiare la batteria.



Ripiegare il poggiatesta verso l'alto.



Premere la leva di ripiegamento (situata sotto il bordo anteriore del sedile) e sollevare il sedile per ripiegarlo all'indietro.



Riporre la sedia sulle ruote antiribaltamento per riporla.

