

eFOLDi[®] Navigator snelstartgids



Plaats de eFOLDi Navigator voor gebruik op een open plek, uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen. Het uitvouwen is eenvoudig en met wat oefening kunt u het in enkele seconden opzetten.

We raden aan om te oefenen voor uw eerste uitstapje.



HOE ONTVOUWEN



Uw eFOLDi Navigator heeft een accessoiretas. Hierin vindt u de anti-tip wielen, een batterijoplader en optionele handgrepen.

Leg de buitenste doos plat neer en verwijder alle verpakking van de Navigator voordat u deze in elkaar zet.



Zet de stoel rechtop en maak de gordelklem los waarmee de stoel is vastgeklapt.



Klap de stoel uit door de zitting naar beneden te duwen.



Plaats de anti-tip wielen in de achterkant van het frame van de stoel met de verende knoppen naar binnen gericht.



Installeer de armen door ze naar beneden te duwen totdat je een klik hoort en de rode knop vergrendelt.



Steek de joystickstang onder de armsteun en draai de knop stevig vast.



Installeer de handgrepen door ze in de bovenkant van het stoelframe te schroeven.



Bevestig de bediening aan de bovenkant van het stoelframe.



Sluit de voedingskabel aan op de batterij door het klepje van de poort te verschuiven en de voedingskabel erin te steken.



Duw de voetsteun omlaag.



Plaats het antislipkussen op de zitting (bobbly kant naar beneden) en zet het vast met het klittenband.



De rode remhendels staan in de voorwaartse stand, waardoor de motor wordt vastgekoppeld. Voor de vrijloopstand zet je beide hendels in de achterwaartse stand.



Zet de aan/uit-knop aan, raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

GEREED TO ROLL!




De handset heeft knoppen om de snelheid aan te passen, met 5 vermogensniveaus en 5 snelheidsinstellingen (1 = laag, 5 = hoog).

Om het omkeergeluid uit te schakelen, druk je gewoon op de knop (zie hierboven).



De begeleidersbediening past de loopsnelheid aan voor je assistent en biedt een batterijcontrole, met een hendel voor voor- en achterwaartse beweging.

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

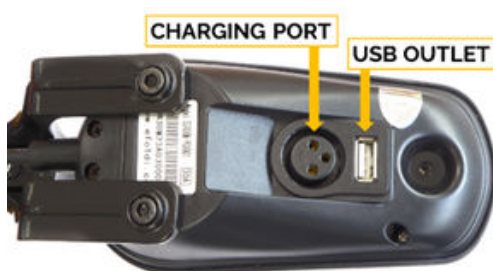

De oplaadpoort bevindt zich onder de handset en er is ook een USB-uitgang voor het voeden van apparaten.



Om de eFOLDi Navigator op te laden, steekt u de oplader in de voet van de joystick en sluit u de AC-stekker aan op een stopcontact. U kunt ook de batterij verwijderen en apart opladen - laat de stoel indien nodig in uw auto.

HOE OPVOUWEN OM OP TE BERGEN



Gebruik de POWER-knop op de handcontroller om de stoel uit te schakelen als je hem niet gebruikt om de batterij te sparen.



Klap de voetsteun omhoog.



Druk op de opklaphendel (onder de voorste rand van de stoel) en til de stoel op om naar achteren te klappen.



Zet de stoel terug op de anti-tip wielen om hem op te bergen.



Let op: deze bijsluiter is alleen bedoeld als een beknopte handleiding.

Raadpleeg voor volledige instructies onze producthandleiding.

Als u vragen hebt, bel ons dan op +44 800 915 0800 of stuur een e-mail naar hello@efoldi.com.

eFOLDi 