

eFOLDi Guia de início rápido do Navigator



Antes de utilizar, coloque o eFOLDi Navigator numa área aberta, longe de animais de estimação e crianças pequenas. O desdobraimento é fácil e, com prática, pode ser montado em segundos.

Recomendamos que pratique antes do seu primeiro passeio.



COMO DESDOBRAR



O seu eFOLDi Navigator tem um saco de acessórios. No seu interior, encontrará as rodas anti-tombamento, um carregador de bateria e pegas opcionais.

Coloque a caixa exterior na horizontal e retire todas as embalagens do Navigator antes de o montar.



Levante a cadeira e desaperte o clipe do cinto de segurança que fixa a cadeira na sua posição dobrada.



Desdobre a cadeira empurrando o assento para baixo.



Introduzir as rodas anti-queda nas costas da estrutura da cadeira com os botões de mola virados para dentro.

Instale os braços empurrando-os para baixo até ouvir um clique e o botão vermelho bloquear.



Insira a haste do joystick por baixo do apoio de braço e aperte bem o botão.



Instale as pegas do assistente aparafusando-as na parte superior da estrutura da cadeira.

Fixe o controlo do assistente na parte superior da estrutura da cadeira.



Ligue o cabo de alimentação à bateria fazendo deslizar a tampa da porta e inserindo o cabo de alimentação.



Empurrar o apoio para os pés para baixo.

Colocar a almofada antiderrapante no assento (com o lado de baixo para cima), fixando-a com as abas de velcro.



As alavancas de travão vermelhas estão colocadas na posição para a frente, o que engata o motor. Para o modo de roda livre, puxe ambas as alavancas para a posição de trás.



Ligar o botão de alimentação, consultar o manual do utilizador para obter mais informações.

PRONTO PARA ROLAR!




O controlador do auscultador possui botões para ajustar a velocidade, com 5 níveis de potência e 5 definições de velocidade (1 = baixa, 5 = alta). Para desativar o som de inversão, basta premir o botão (mostrado acima).



O controlo do assistente ajusta a velocidade de marcha para o seu assistente e permite verificar a bateria, com uma alavanca para avançar e recuar.

CARREGAMENTO DA BATERIA

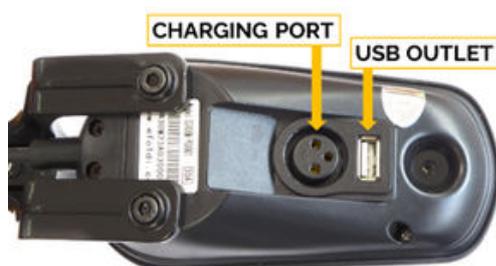

A porta de carregamento encontra-se por baixo do telemóvel e existe também uma tomada USB para alimentar dispositivos.



Para carregar a eFOLDi Navigator, ligue o carregador à base do joystick e ligue a ficha CA a uma tomada eléctrica. Em alternativa, pode retirar a bateria e carregá-la separadamente - deixando a cadeira no carro, se necessário.

COMO DOBRAR PARA GUARDAR



Utilize o botão POWER no comando manual para desligar a cadeira quando não estiver a ser utilizada, de modo a conservar a energia da bateria.



Dobrar o apoio para os pés para cima.



Prima a alavanca de dobragem (situada sob o bordo dianteiro do banco) e levante o banco para o rebater.



Coloque a cadeira sobre as rodas anti-queda para a guardar.

