

eFOLDi® Navigator Snabbstartsguide



Placera eFOLDi Navigator på en öppen plats, utom räckhåll för husdjur och små barn, innan du börjar använda den. Det är lätt att fälla ut och med lite övning kan du sätta upp den på några sekunder. Vi rekommenderar att du övar innan din första utflykt.



HUR MAN VIKER UPP



Din eFOLDi Navigator har en tillbehörsväska. I den hittar du tippskyddshjulen, en batteriladdare och handtag som tillval.



Lägg ytterkartongen platt och ta bort allt emballage från Navigator före montering.



Ställ upp stolen och lossa säkerhetsbältets klämma som håller stolen i hopfällt läge.



Fäll ut stolen genom att trycka ner sitsen.



Sätt in tippskydden i stolens bakre del med de fjädrande knapparna vända inåt.



För in joystickstangen under armstödet och dra åt vredet mycket ordentligt.



Montera ledsagarhandtagen genom att skruva fast dem i stolens övre del.



Fäst skötkontrollen på ovansidan av stolens ram.



Anslut strömkabeln till batteriet genom att skjuta på portlocket och sätta i strömkabeln.



Skjut ner fotstödet.



Placera den halkfria dynan på sätet (med den bobblika sidan nedåt) och fäst den med kardborreflikarna.



De röda bromsspakarna är placerade i det främre läget som kopplar in motorn. För frihjulsläge, dra båda spakarna till bakåtläge.



Slå på strömbrytaren, se användarhandboken för mer information.

KLAR TILL ROLL!




Handkontrollen har knappar för att justera hastigheten, med 5 effektnivåer och 5 hastighetsinställningar (1 = låg, 5 = hög). För att avaktivera backningsljudet trycker du bara på knappen (visas ovan).



Ledsagarkontrollen justerar gånghastigheten för din assistent och ger möjlighet till batterikontroll, med en spak för framåt- och bakåtkörning.

BATTERILADNING

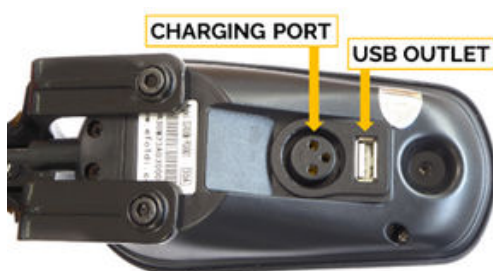

Laddningsporten sitter under handenheten och det finns även ett USB-uttag för strömförsörjning av enheter.



För att ladda eFOLDi Navigator, anslut laddaren till joystickens bas och anslut AC-kontakten till ett eluttag. Alternativt kan du ta ut batteriet och ladda det separat - och lämna stolen i bilen om det behövs.

HUR MAN VIKER



Använd POWER-knappen på handkontrollen för att stänga av stolen när den inte används för att spara på batteriet.



Fäll upp fotstödet.



Tryck på fällspaken (under sätets framkant) och lyft sätet så att det fälls bakåt.



Sätt tillbaka stolen på de tipskyddade hjulen och förvara den.



Observera att denna broschyr endast är avsedd att vara en snabbguide. För fullständiga instruktioner, vänligen se vår produktmanual för användaren. Om du har några frågor, vänligen ring oss på +44 800 915 0800 eller skicka ett e-postmeddelande till hello@efoldi.com