




Před použitím umístěte kompas eFOLDi na volné prostranství mimo dosah domácích zvířat a malých dětí. Rozložení je snadné a můžete jej nastavit během několika sekund. Před prvním výletem doporučujeme nácvik.



JAK SE ROZLOŽIT

KROK 1 – MONTÁŽ SLOUPKU ŘÍZENÍ

Před zahájením odstraňte všechny obaly.

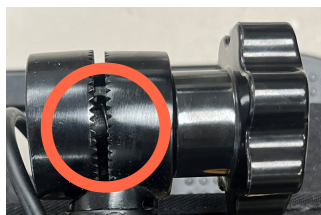

Zkontrolujte, zda je ozubené kolo uvolněné (proti směru hodinových ručiček) a zda je mezi zuby závěsu mezera.



Uvolněte sloupek řízení z plastové svorky a zvedněte jej do svislé polohy.



Sloupek řízení zajistěte otočením ozubeného kola (ve směru hodinových ručiček). Sloupek řízení můžete nastavit tak, aby vyhovoval vašemu dosahu a pohodlí.

KROK 2 – ZVEDNUTÍ SEDADLA



Zvedněte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Sedák „zacvakne“ na místo.



MONTÁŽ (VOLITELNÉ) LOKETNÍ OPĚRKY



Nasadte opěrky rukou na místo, vyrovnejte je a utáhněte pomocí velkých otočných knoflíků, které se snadno drží.

ZÁVĚREČNÉ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY



Zkontrolujte, zda je sloupek řízení bezpečně upevněn, pokud ne – utáhněte ozubené kolo.

Zkontrolujte, zda je červená páčka magnetické brzdy v poloze ZABLOKOVÁNO (dozadu), aby došlo k zablokování motoru.



Koloběžku zapnete stisknutím šedého tlačítka pod displejem baterie. Zvolte (D) pro jízdu nebo (R) pro jízdu vzad a poté stiskněte plynové tlačítko pro jízdu. Nezapomeňte baterii znovu nabít, když se na displeji zobrazí oranžová barva.



K nabíjení připojte napájecí kabel k nabíjecímu portu umístěnému na horní části sloupku řízení.



Chcete-li baterii vyjmout, zvedněte západku a opatrně ji vytáhněte nahoru.

Nabíjecí port se nachází na straně baterie.

KROK 1 – SKLOPENÍ OPĚRADLA



Compass se skládá vždy stejným způsobem, ať už je vybaven loketní opěrkou, nebo ne.

Zatáhněte za žlutý přepínač a uvolněte sedadlo. Opěradlo sedadla sklopte do roviny k základně sedadla tak, aby procházelo a sedlo pod ozubením sloupku řízení.

KROK 2 – SBALENÍ SLOUPKU ŘÍZENÍ



Otáčením ozubeného kola (proti směru hodinových ručiček) uvolněte sloupek řízení.

Položte sloupek řízení naplocho na opěradlo sedadla a upevněte jej do plastové spony.

Vezměte prosím na vědomí, že tento leták slouží pouze jako stručný návod. Úplné pokyny naleznete v našem návodu k obsluze výrobku. V případě jakýchkoli dotazů nám zavolejte na číslo 0800 915 0800 nebo napište na adresu services@efoldi.com.