




Stellen Sie den eFOLDi Compass vor der Benutzung in einem offenen Bereich auf, der von Haustieren und kleinen Kindern ferngehalten wird. Das Entfalten ist einfach, und Sie können ihn in Sekundenschnelle aufstellen. Wir empfehlen, vor Ihrem ersten Ausflug zu üben.



**WIE
ENTFALTEN**

SCHRITT 1 – ZUSAMMENBAU DER LENKSÄULE

Entfernen Sie alle Verpackungen, bevor Sie beginnen.

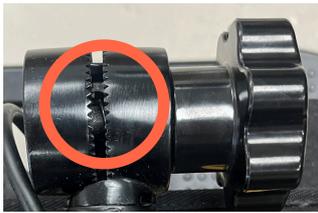

Vergewissern Sie sich, dass das Zahnrad gelockert ist (gegen den Uhrzeigersinn) und eine Lücke zwischen den Zähnen des Scharniers besteht.

Lösen Sie die Lenksäule aus der Kunststoffklammer und heben Sie sie in die aufrechte Position.

Sichern Sie die Lenksäule durch Drehen des Riegels (im Uhrzeigersinn). Sie können die Lenksäule so positionieren, dass sie Ihrer Reichweite und Ihrem Komfort entspricht

SCHRITT 2 – ANHEBEN DES SITZES



Heben Sie die Sitzlehne in die aufrechte Position. Sie rastet dann mit einem „Klick“ ein.



EINBAU VON (OPTIONALEN) ARMLEHNEN



Setzen Sie die Armlehnen ein, richten Sie sie aus und ziehen Sie sie mit den großen, griffigen Drehknöpfen fest.

LETZTE SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN



Vergewissern Sie sich, dass die Lenksäule sicher befestigt ist; falls nicht, ziehen Sie das Zahnrad fest.

Vergewissern Sie sich, dass sich der rote Magnetbremshebel in der Position LOCKED (rückwärts) befindet, um den Motor zu aktivieren.

ERSTE SCHRITTE

BEDIENUNGSANLEITUNG



Um den Roller einzuschalten, drücken Sie die graue Taste unter dem Batteriebildschirm. Wählen Sie (D) für Fahren oder (R) für Rückwärtsfahren, und drücken Sie dann den Daumengashebel, um loszufahren. Achten Sie darauf, die Batterie wieder aufzuladen, wenn die Anzeige gelb leuchtet.



Zum Aufladen schließen Sie das Stromversorgungskabel an den Ladeanschluss oben an der Lenksäule an.



Um den Akku zu entfernen, heben Sie die Verriegelung an und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben. Der Ladeanschluss befindet sich auf der Seite des Akkus.

WIE MAN SIE ZUM AUFBEWAHR EN FALTET

SCHRITT 1 – FALTEN DER RÜCKENLEHNE



Der Compass lässt sich immer auf dieselbe Weise zusammenklappen, egal ob er mit oder ohne Armlehnen ausgestattet ist.

Ziehen Sie den gelben Knebel, um den Sitz zu lösen.

Klappen Sie die Rückenlehne des Sitzes flach gegen die Sitzfläche und stellen Sie sicher, dass sie unter dem Zahnrad der Lenksäule liegt.

SCHRITT 2 – LENKSÄULE EINKLAPPEN



Lösen Sie die Lenksäule durch Drehen des Riegels (gegen den Uhrzeigersinn).

Legen Sie die Lenksäule flach gegen die Sitzlehne und befestigen Sie sie in der Kunststoffklammer

Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt nur als Kurzanleitung gedacht ist. Eine vollständige Anleitung finden Sie in unserem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter 0800 915 0800 an oder senden Sie eine E-Mail an services@efoldi.com.