




Før brug skal eFOLDi-kompasset placeres i et åbent område væk fra kæledyr og små børn. Det er nemt at folde ud, og du kan sætte det op på få sekunder. Vi anbefaler, at du øver dig inden din første tur.



SÅDAN FOLDER DU UD

TRIN 1 – SAML RATSTAMMEN

Fjern al emballage, før du begynder.

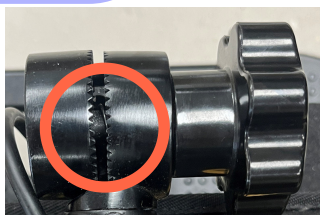

Sørg for, at tandhjulet er løsnet (mod uret), og at der er et mellemrum mellem tænderne på hængslet.



Løsn ratstammen fra plastikklemmen, og løft den op i lodret position.



Fastgør ratstammen ved at dreje tandhjulet (med uret). Du kan placere ratstammen, så den passer til din rækkevidde og komfort

TRIN 2 – HÆV SÆDET



Løft sædets ryglæn op i lodret position. Det vil »klikke« på plads.



MONTERING AF ARMLÆN (EKSTRAUDSTYR)



Sæt armlænene på plads, ret dem ind, og spænd dem fast med de store, grebsvenlige drejknapper.

SIDSTE SIKKERHEDSTJEK



Sørg for, at ratstammen er forsvarligt fastgjort, hvis ikke – stram tandhjulet.

Kontrollér, at det røde magnetiske bremsegreb er i positionen LOCKED (bagud) for at aktivere motoren.

AT KOMME I GANG



Tænd for løbehjulet ved at trykke på den grå knap under batteriskærmen. Vælg (D) for Drive eller (R) for Reverse, og tryk derefter på tommelfingergrebet for at køre. Sørg for at genoplade batteriet, når displayet viser gult.

HVORDAN MAN BETJENER



For at oplade skal du tilslutte strømforsyningskablet til opladningsporten øverst på ratstammen.



For at fjerne batteriet skal du løfte låsen og forsigtigt trække den opad.

Opladningsporten er placeret på siden af batteriet.

HVORDAN MAN FOLDER FOR AT OPBEVARE

TRIN 1 – FOLD RYGLÆNET



Træk i den gule knap for at frigøre sædet.



Fold sædets ryglæn fladt ned mod sædebasen, så det passerer og sidder under ratstammens tandhjul.



Compass klappes altid sammen på samme måde, uanset om den er udstyret med eller uden armlæn.

TRIN 2 – KLAP RATSTAMMEN SAMMEN



Frigør ratstammen ved at dreje tandhjulet (mod uret).



Læg ratstammen fladt mod ryglænet, og sæt den fast i plastikklemmen.



Bemærk, at denne folder kun er tænkt som en hurtig vejledning. For fuldstændige instruktioner henvises til vores produktmanual. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på 0800 915 0800 eller sende en e-mail til services@efoldi.com.