




Antes de usarla, coloque la brújula eFOLDi en una zona abierta, lejos de animales domésticos y niños pequeños. Desplegarla es fácil y se monta en segundos. Te recomendamos que practiques antes de tu primera salida.



## CÓMO DESDOBLAR

### PASO 1 – MONTAJE DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

Retire todos los envases antes de empezar.

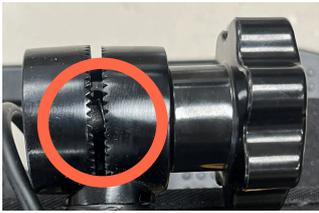

Asegúrese de que el engranaje esté aflojado (en sentido antihorario) y de que haya un espacio entre los dientes de la bisagra.



Suelte la columna de dirección del clip de plástico y levántela hasta la posición vertical.



Fije la columna de dirección girando el engranaje (en el sentido de las agujas del reloj). Puede colocar la columna de dirección para adaptarla a su alcance y comodidad.

### PASO 2 – LEVANTAR EL ASIENTO



Levante el respaldo del asiento hasta la posición vertical. Encajará con un «clic».




#### MONTAJE (OPCIONAL) REPOSABRAZOS



Coloque los reposabrazos en su sitio, alinéelos y apriételos con los grandes pomos giratorios de fácil agarre.

### ÚLTIMOS CONTROLES DE SEGURIDAD

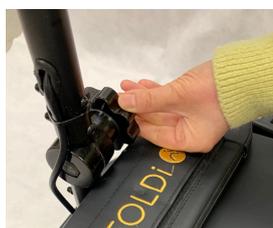

Asegúrese de que la columna de dirección está bien sujeta, si no es así - apriete la rueda dentada.



Compruebe que la palanca roja del freno magnético está en la posición de BLOQUEADO (hacia atrás) para engranar el motor.

## CÓMO EMPEZAR



**Para encender el scooter**, pulse el botón gris situado debajo de la pantalla de la batería. Seleccione (D) para Conducir o (R) para Marcha atrás y, a continuación, pulse el acelerador de pulgar para ponerse en marcha. Asegúrese de recargar la batería cuando la pantalla muestre el color ámbar.

## CÓMO FUNCIONAR



**Para cargar**, conecte el cable de alimentación al puerto de carga situado en la parte superior de la columna de dirección.



**Para extraer la batería**, levante el pestillo y tire con cuidado hacia arriba.

El puerto de carga se encuentra en el lateral de la batería.

## CÓMO PLEGAR PARA GUARDAR

### PASO 1 – PLEGAR EL RESPALDO



El Compass se pliega siempre de la misma manera, tanto si lleva reposabrazos como si no.

Tire de la palanca amarilla para liberar el asiento.

Pliegue el respaldo del asiento contra la base del asiento, asegurándose de que pasa y se asienta debajo del engranaje de la columna de dirección.

### PASO 2 – COLAPSAR LA COLUMNA DE DIRECCIÓN



Suelte la columna de dirección girando la rueda dentada (en sentido antihorario).

Coloque la columna de dirección plana contra el respaldo del asiento y fíjela en el clip de plástico

Tenga en cuenta que este folleto es sólo una guía rápida. Para obtener instrucciones completas, consulte nuestro manual de usuario del producto. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 0800 915 0800 o envíe un correo electrónico a [services@efoldi.com](mailto:services@efoldi.com).