




Avant de l'utiliser, placez la boussole eFOLDi dans un endroit ouvert, à l'écart des animaux domestiques et des jeunes enfants. Le dépliage est facile et vous pouvez l'installer en quelques secondes. Nous vous recommandons de vous entraîner avant votre première sortie.



COMMENT DÉPLIER

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION

Retirez tous les emballages avant de commencer.

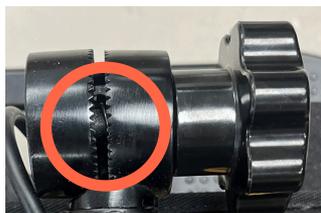

Assurez-vous que le pignon est desserré (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et qu'il y a un espace entre les dents de la charnière.



Dégager la colonne de direction du clip en plastique et la soulever en position verticale.



Fixez la colonne de direction en tournant la roue dentée (dans le sens des aiguilles d'une montre). Vous pouvez positionner la colonne de direction en fonction de votre portée et de votre confort.

ÉTAPE 2 - RELEVER LE SIÈGE



Soulevez le dossier du siège en position verticale. Il se met en place avec un « clic ».




MONTAGE DES ACCOUDOIRS (EN OPTION)



Mettez les accoudoirs en place, alignez-les et serrez-les à l'aide des gros boutons tournants faciles à saisir.

DERNIERS CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

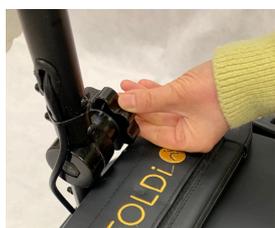

Assurez-vous que la colonne de direction est bien fixée, sinon resserrez l'engrenage.



Vérifiez que le levier rouge du frein magnétique est en position VERROUILLÉE (vers l'arrière) pour engager le moteur.

POUR COMMENCER



Pour allumer le scooter, appuyez sur le bouton gris situé sous l'écran de la batterie. Sélectionnez (D) pour la conduite ou (R) pour la marche arrière, puis appuyez sur l'accélérateur pour démarrer. Veillez à recharger la batterie lorsque l'écran affiche l'ambre.

COMMENT FONCTIONNER



Pour charger, connectez le câble d'alimentation au port de charge situé en haut de la colonne de direction.



Pour retirer la batterie, soulevez le loquet et tirez-la délicatement vers le haut. Le port de chargement est situé sur le côté de la batterie

COMMENT PLIER POUR RANGER

ÉTAPE 1 - PLIER LE DOSSIER



Le Compass se plie toujours de la même manière, qu'il soit équipé ou non d'accoudoirs.

Tirez sur la bascule jaune pour libérer le siège.

Rabattez le dossier du siège à plat contre la base du siège, en veillant à ce qu'il passe et repose sous le pignon de la colonne de direction.

ÉTAPE 2 - DÉMONTAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION



Débloquer la colonne de direction en tournant la roue dentée (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Placer la colonne de direction à plat contre le dossier du siège et la fixer dans le clip en plastique.

Veillez noter que ce dépliant n'est qu'un guide rapide. Pour des instructions complètes, veuillez vous référer à notre manuel d'utilisation. Si vous avez des questions, appelez-nous au 0800 915 0800 ou envoyez-nous un courriel à services@efoldi.com.