




Prima dell'uso, posizionare la bussola eFOLDi in un'area aperta, lontano da animali domestici e bambini piccoli. Lo spiegamento è facile e si può impostare in pochi secondi. Si consiglia di fare pratica prima della prima uscita.



COME SVOLGERE

FASE 1 - MONTAGGIO DEL PIANTONE DELLO STERZO

Rimuovere tutti gli imballaggi prima di iniziare.

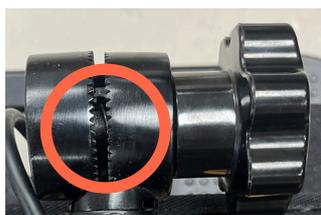

Assicurarsi che l'ingranaggio sia allentato (in senso antiorario) e che vi sia uno spazio tra i denti della cerniera.



Sganciare il piantone dello sterzo dalla clip di plastica e sollevarlo in posizione verticale.



Fissare il piantone dello sterzo ruotando l'ingranaggio (in senso orario). È possibile posizionare il piantone dello sterzo in modo da adattarlo al proprio raggio d'azione e al proprio comfort.



FASE 2 - SOLLEVARE IL SEDILE



Sollevare lo schienale del sedile in posizione verticale. Il sedile scatta in posizione.



MONTAGGIO (OPZIONALE) DEI BRACCIOLI



Inserire i braccioli in posizione, allinearli e stringerli utilizzando le manopole a rotazione grandi e facili da impugnare.

CONTROLLI DI SICUREZZA FINALI



Assicurarsi che il piantone dello sterzo sia fissato saldamente; in caso contrario, serrare l'ingranaggio.



Verificare che la leva rossa del freno magnetico sia in posizione LOCKED (indietro) per bloccare il motore.

INIZIARE A LAVORARE



Per accendere lo scooter, premere il pulsante grigio sotto la schermata della batteria. Selezionare (D) per la guida o (R) per la retromarcia, quindi premere l'acceleratore a pollice per partire. Assicurarsi di ricaricare la batteria quando il display mostra il colore ambra.

COME FUNZIONA



Per la ricarica, collegare il cavo di alimentazione alla porta di ricarica situata nella parte superiore del piantone dello sterzo.



Per rimuovere la batteria, sollevare il fermo e tirarla con cautela verso l'alto. La porta di ricarica si trova sul lato di la batteria.

COME PIEGARE PER RIPORRE

FASE 1 – PIEGARE LO SCHIENALE



La Compass si ripiega sempre allo stesso modo, con o senza braccioli.

Tirare la levetta gialla per sganciare il sedile.

Ripiegare lo schienale del sedile contro la base del sedile, assicurandosi che passi e si posizioni sotto l'ingranaggio del piantone dello sterzo.

FASE 2 – COLLASSARE IL PIANTONE DELLO STERZO



Rilasciare il piantone dello sterzo ruotando l'ingranaggio (in senso antiorario).

Appoggiare il piantone dello sterzo contro lo schienale del sedile e fissarlo nella clip di plastica.

Si prega di notare che questo opuscolo è solo una guida rapida. Per le istruzioni complete, consultare il manuale d'uso del prodotto. Per qualsiasi domanda, chiamateci al numero 0800 915 0800 o inviate un'e-mail a services@efoldi.com.