




Plaats het eFOLDi kompas voor gebruik op een open plek, uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen. Het uitvouwen is eenvoudig en je kunt het in enkele seconden opzetten. We raden aan om te oefenen voor je eerste uitstapje.



HOE ONTVOUWEN

STAP 1 – DE STUURKOLOM MONTEREN

Verwijder alle verpakking voordat je begint.

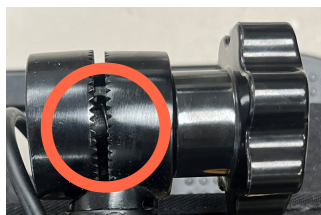

Zorg ervoor dat het tandwiel is losgedraaid (tegen de klok in) en dat er ruimte is tussen de tanden op het scharnier.



Maak de stuurkolom los van de plastic clip en til hem rechtop.



Zet de stuurkolom vast door het tandwiel (met de klok mee) te draaien. Je kunt de stuurkolom in de juiste stand zetten voor jouw bereik en comfort

STAP 2 – ZET DE STOEL OMHOOG



Til de rugleuning van de stoel in de rechtopstaande positie. Hij "klikt" vast.



MONTAGE (OPTIONEEL) ARMLEUNINGEN



Zet de armsteunen op hun plaats, lijn ze uit en draai ze vast met de grote, gemakkelijk vast te pakken draaiknoppen.

LAATSTE VEILIGHEIDSCONTROLES



Controleer of de stuurkolom goed vastzit, zo niet, draai het tandwiel dan vast.

Controleer of de rode magnetische remhendel in de stand VERGRENDELD (naar achteren) staat om de motor in te schakelen.

AAN DE SLAG



Om de step aan te zetten, druk je op de grijze knop onder het batterijscherm. Selecteer (D) voor Rijden of (R) voor Achteruit en druk vervolgens op de duimgashendel om te gaan. Zorg ervoor dat je de accu oplaadt als het scherm oranje aangeeft.

HOE TE BEDIENEN



Om op te laden, sluit je de voedingskabel aan op de oplaadpoort bovenaan de stuurkolom.



Om de batterij te verwijderen, til je de vergrendeling op en trek je deze voorzichtig omhoog. De oplaadpoort bevindt zich aan de zijkant van de batterij.

HOE OPVOUWEN OM OP TE BERGEN

STAP 1 – DE RUGLEUNING VOUWEN



De Compass vouwt altijd op dezelfde manier op, of hij nu met of zonder armleuningen is uitgerust.

Trek aan de gele knevel om de stoel los te maken.

Klap de rugleuning van de stoel plat tegen de stoelbasis en zorg ervoor dat deze onder het tandwiel van de stuurkolom komt.

STAP 2 – DE STUURKOLOM INKLAPPEN



Maak de stuurkolom los door het tandwiel tegen de klok in te draaien.

Leg de stuurkolom plat tegen de rugleuning van de stoel en zet hem vast in de plastic clip

Let op: deze bijsluiter is bedoeld als een beknopte handleiding. Raadpleeg voor volledige instructies onze producthandleiding. Als u vragen hebt, bel ons dan op 0800 915 0800 of stuur een e-mail naar services@efoldi.com.