




Før du tar eFOLDi Compass i bruk, må du plassere det i et åpent område, borte fra kjæledyr og små barn. Det er enkelt å brette det ut, og du kan sette det opp på få sekunder. Vi anbefaler at du øver deg før første tur.



SLIK
FALLER
DU UT

TRINN 1 – MONTER RATTSTAMMEN

Fjern all emballasje før du begynner.

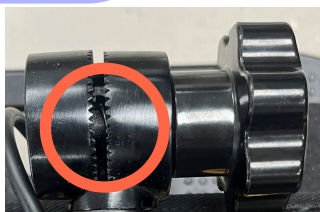

Kontroller at tannhjulet er løsnet (mot urviseren) og at det er et mellomrom mellom tennene på hengslet.



Løsne rattstammen fra plastklemmen, og løft den opp i oppreist stilling.



Fest rattstammen ved å vri på tannhjulet (med klokken). Du kan plassere rattstammen slik at den passer til din rekkevidde og komfort



TRINN 2 – HEV SETET



Løft seteryggen til oppreist stilling. Det vil «klikke» på plass.



MONTERING AV ARMLENER (EKSTRAUTSTYR)



Sett armlenene på plass, rett dem inn, og stram til med de store, grepsvennlige vrikknappene.

AVSLUTTENDE SIKKERHETSKONTROLLER



Kontroller at rattstammen er godt festet, hvis ikke – stram til tannhjulet.



Kontroller at den røde magnetiske bremsespaken er i LÅST (bakover) stilling for å koble inn motoren.

KOMME I GANG



For å slå på sparkesykkelen trykker du på den grå knappen under batteriskjermen. Velg (D) for Drive (kjør) eller (R) for Reverse (revers), og trykk deretter på tommelgassen for å sette i gang. Sørg for å lade batteriet når displayet viser gult.

HVORDAN BRUKER DU



For å lade kobler du strømforsyningskabelen til ladeporten øverst på rattstammen.



Batteriet tas ut ved å løfte låsen på og trekke det forsiktig oppover. Ladeporten er plassert på siden av batteriet.

HVORDAN DU BRETTET FOR Å LAGRE

TRINN 1 – BRETT RYGGSTØTTEN



Trekk i den gule vippeknappen for å løsne setet.



Brett seteryggen flatt ned mot setebasen, og pass på at den passerer og sitter under rattstammen.



Compass brettes alltid på samme måte, uansett om den er utstyrt med eller uten armlener.

TRINN 2 – SLÅ SAMMEN RATTSTAMMEN



Løsne rattstammen ved å vri tannhjulet (mot urviseren).



Legg rattstammen flatt mot seteryggen og fest den i plastklemmen



Vær oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som en kortfattet veiledning. For fullstendige instruksjoner, se produkthåndboken. Hvis du har spørsmål, kan du ringe oss på 0800 915 0800 eller sende en e-post til services@efoldi.com