




Przed użyciem należy umieścić eFOLDi Compass na otwartej przestrzeni, z dala od zwierząt domowych i małych dzieci. Rozkładanie jest łatwe i można je skonfigurować w kilka sekund. Zalecamy przećwiczenie przed pierwszą wycieczką.



JAK SIĘ ROZŁOŻYĆ

KROK 1 – MONTAŻ KOLUMNY KIEROWNICY

Przed rozpoczęciem usuń wszystkie opakowania.

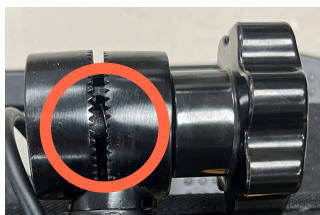

Upewnij się, że zębatka jest poluzowana (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), a między zębami zawiasu jest przerwa.



Zwolnij kolumnę kierownicy z plastikowego zaczepu i podnieś ją do pozycji pionowej.



Zabezpiecz kolumnę kierownicy, przekręcając zębatkę (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Kolumnę kierownicy można ustawić w taki sposób, aby dostosować ją do swojego zasięgu i wygody

KROK 2 – PODNIESIENIE SIEDZENIA



Podnieś oparcie fotela do pozycji pionowej. Oparcie „zatrzaśnie się” na swoim miejscu.



MONTAŻ (OPCJONALNY) PODŁOKIETNIKÓW



Nasadźte opěrky rukou na místo, vyrovnejte je a utáhněte pomocí velkých otočných knoflíků, které se snadno drží.

KOŃCOWE KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA



Upewnij się, że kolumna kierownicy jest dobrze zamocowana, jeśli nie – dokręć zębatkę.

Sprawdź, czy czerwona dźwignia hamulca magnetycznego znajduje się w pozycji ZABLOKOWANEJ (do tyłu), aby włączyć silnik.

ROZPOCZĘCIE

SPOSÓB DZIAŁANIA



Aby włączyć hulajnogę, naciśnij szary przycisk pod ekranem akumulatora. Wybierz (D) dla jazdy do przodu lub (R) dla jazdy do tyłu, a następnie naciśnij kciuk przepustnicy, aby ruszyć. Pamiętaj, aby ponownie naładować akumulator, gdy na wyświetlaczu pojawi się pomarańczowy wskaźnik.



Aby naładować akumulator, podłącz przewód zasilający do portu ładowania znajdującego się w górnej części kolumny kierownicy.



Aby wyjąć akumulator, należy podnieść zatrzask i ostrożnie pociągnąć go do góry.

Port ładowania znajduje się z boku akumulatora.

JAK ZŁOŻYĆ DO PRZECHOWYWANIA

KROK 1 – SKŁADANIE OPARCIA



Compass zawsze składa się w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy jest wyposażony w podłokietniki, czy nie.

Pociągnij żółty przełącznik, aby zwolnić siedzisko.

Złóż oparcie siedzenia płasko do podstawy siedzenia, upewniając się, że przechodzi ono i znajduje się pod zębatką kolumny kierownicy.

KROK 2 – ZŁOŻENIE KOLUMNY KIEROWNICY



Zwolnij kolumnę kierownicy, przekręcając zębatkę (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Połóż kolumnę kierownicy płasko na oparciu fotela i zamocuj w plastikowym zacisku.

Należy pamiętać, że niniejsza ulotka ma służyć wyłącznie jako skrócona instrukcja. Aby uzyskać pełne instrukcje, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi produktu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0800 915 0800 lub e-mailowy pod adresem services@efoldi.com.