




Antes de utilizar, coloque o eFOLDi Compass numa área aberta, longe de animais de estimação e crianças pequenas. A desdobração é fácil e pode ser montada em segundos. Recomendamos que pratique antes do seu primeiro passeio.



## COMO DESDOBRAR

### ETAPA 1 – MONTAGEM DA COLUNA DE DIRECÇÃO

Remove all packaging before you begin.

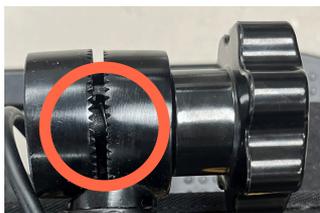

Verificar se a roda dentada está desapertada (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e se existe um espaço entre os dentes da dobradiça.



Solte a coluna de direcção do clipe de plástico e levante-a para a posição vertical.



Fixe a coluna de direcção rodando a roda dentada (no sentido dos ponteiros do relógio). Pode posicionar a coluna de direcção de acordo com o seu alcance e conforto


### PASSO 2 – LEVANTAR O BANCO



Levante o encosto do banco para a posição vertical. O encosto faz um "clique" na posição correta.



#### MONTAGEM (OPCIONAL) DE APOIOS DE BRAÇOS

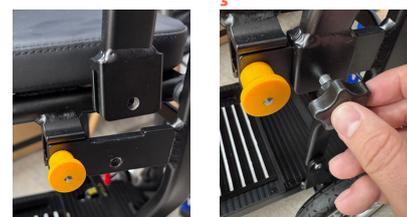

Coloque os apoios de braços no lugar, alinhe-os e aperte-os utilizando os botões de torção grandes e fáceis de agarrar.

### CONTROLOS FINAIS DE SEGURANÇA



Certifique-se de que a coluna de direcção está bem fixada; se não estiver, aperte a roda dentada.



Verifique se a alavanca vermelha do travão magnético está na posição LOCKED (para trás) para engatar o motor.

## COMEÇAR



**Para ligar a scooter,** prima o botão cinzento por baixo do ecrã da bateria. Selecione (D) para Conduzir ou (R) para Marcha atrás e, em seguida, prima o acelerador de polegar para avançar. Certifique-se de que recarrega a bateria quando o ecrã mostrar a cor âmbar.

## COMO FUNCIONAR



**Para carregar,** ligue o cabo de alimentação à porta de carregamento situada na parte superior da coluna de direcção.



**Para retirar a bateria,** levante o trinco e puxe-o cuidadosamente para cima. A porta de carregamento está localizada na parte lateral da bateria.

## COMO DOBRAR PARA GUARDAR

### PASSO 1 – DOBRAR O ENCOSTO




O Compass dobra-se sempre da mesma forma, quer esteja equipado com ou sem apoios de braços.

Puxe o botão amarelo para libertar o banco.

Dobre o encosto do banco para baixo contra a base do banco, certificando-se de que passa e assenta por baixo da roda dentada da coluna de direcção.

### PASSO 2 – DESMONTAR A COLUNA DE DIRECÇÃO

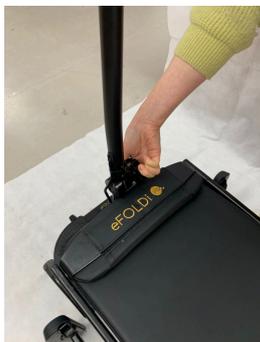

Soltar a coluna de direcção rodando a roda dentada (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

Encostar a coluna de direcção às costas do banco e fixá-la no clipe de plástico

Este folheto destina-se a ser apenas um guia rápido. Para obter instruções completas, consulte o manual do utilizador do produto. Se tiver alguma dúvida, contacte-nos através do número 0800 915 0800 ou envie um e-mail para [services@efoldi.com](mailto:services@efoldi.com)