




Placera eFOLDi Compass på en öppen plats, utom räckhåll för husdjur och små barn, innan du börjar använda den. Den är enkel att fälla ut och du kan sätta upp den på några sekunder. Vi rekommenderar att du övar innan din första utflykt.



HUR MAN VIKER UPP

STEG 1 – MONTERA RATTSTÅNGEN

Ta bort allt emballage innan du börjar.

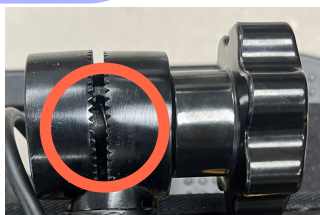

Se till att kugghjulet är lossat (moturs) och att det finns ett mellanrum mellan tänderna på gångjärnet.



Lossa rattstången från plastklämman och lyft upp den i upprätt läge.



Säkra rattstången genom att vrida kugghjulet (medurs). Du kan placera rattstången så att den passar din räckvidd och komfort



STEG 2 – HÖJ OCH SÄNK SÄTET



Lyft upp ryggstödet till upprätt läge. Det kommer att "klicka" på plats.



MONTERING (TILLVAL) ARMSTÖD



Sätt armstöden på plats, rikta in dem och dra åt med hjälp av de stora, greppvänliga vridknapparna.

SLUTLIGA SÄKERHETSKONTROLLER



Kontrollera att rattstången sitter fast ordentligt, om inte – dra åt kugghjulet.

Kontrollera att den röda magnetbromsspaken är i läget LOCKED (bakåt) för att koppla in motorn.

KOMMA IGÅNG



Sätt på scootern genom att trycka på den grå knappen under batteriskärmen. Välj (D) för körning eller (R) för backning och tryck sedan på tumreglaget för att köra. Var noga med att ladda batteriet när displayen visar gult.

HUR MAN ANVÄNDER



För att ladda, anslut strömförsörjningskabeln till laddningsporten som sitter högst upp på rattstången.



För att ta bort batteriet, lyft spärren och dra den försiktigt uppåt.

Laddningsporten sitter på sidan av batteriet.

HUR MAN VIKER FÖR ATT FÖRVARA

STEG 1 – VIK RYGGSTÖDET



Dra i den gula knappen för att lossa sätet.



Fäll ner ryggstödet platt mot sätesunderlaget och se till att det passerar och sitter under rattstångens kugghjul.



Compass fälls alltid på samma sätt, oavsett om den är utrustad med eller utan armstöd.

STEG 2 – FÄLL IHOP RATTSTÅNGEN



Lossa rattstången genom att vrida kugghjulet (moturs).



Lägg rattstången platt mot ryggstödet och sätt fast den i plastklämman



Observera att denna broschyr endast är avsedd att vara en snabbguide.

För fullständiga instruktioner, vänligen se vår produktmanual för användaren. Om du har några frågor, vänligen ring oss på 0800 915 0800 eller skicka ett e-postmeddelande till services@efoldi.com